

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

W a s s e r s t o f f - I n h a l a t i o n s m a s c h i n e

AMS H03



ASCLEPIUS MEDITEC
— EUROPE —

Inhalt

Vorwort.....	3
Sicherheitsvorkehrungen.....	3
一、 Produkteinführung - Features.....	5
二、 Anleitung vor dem Gebrauch.....	6
2.1 Geltungsbereich.....	6
2.2 Kontraindikationen.....	6
2.3 Umwelt.....	6
2.4 Anforderungen an den Betreiber.....	6
2.5 Tägliche kumulative Belüftung.....	7
三、 Installation und Verwendung.....	8
3.1 Name von jede Komponente.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.2 Installationsanleitungen und Diagramme.....	8
四、 TechnischeParameter.....	11
五、 Regelmäßige Wartung.....	11
5.1 Methoden zur Produktwartung.....	12
5.2 Wartungsschritte.....	12
5.3 Fehlerbehebung.....	13
5.4 Transport von Produkten.....	14
5.5 P roduct Lagerung.....	14
Produkt-Garantiekarte.....	16

Vorwort

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer.

Willkommen bei Asclepius Meditec und dem Produkt AMS H03, dem „Browns Gas System“. Um Ihnen die Verwendung zu erleichtern, haben wir Ihnen dieses Handbuch zur Verfügung gestellt, in dem die Merkmale, Bedienfunktionen, Gebrauchsanweisungen, die einfache Fehlerbehebung und die Wartung des Wasserstoff-Inhalationsgeräts aufgeführt sind.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Ich glaube, es wird für Sie hilfreich sein, das Produkt zu verwenden. Wenn Sie während des Nutzungsprozesses auf Probleme stoßen, die für eine Weile schwer zu lösen sind, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihnen von ganzem Herzen dienen.

Sicherheitsvorkehrungen

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, müssen Sie die Sicherheitsregeln sorgfältig lesen.



- Warnung! "Inhalte, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können".
- Aufpassen! Inhalte, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.
- Artikelschaden bezieht sich auf den Schaden im Zusammenhang mit Häusern und Eigentum



Details

1. Das Gerät muss die öffentliche Steckdose mit einer Kapazität von 220 V / 10A / 50 Hz (110 V / 60 Hz) mit effektiver Erdung verwenden, um die Anforderungen an den sicheren Stromverbrauch und die elektrostatische Entladung des Geräts zu erfüllen.
2. Die Schutzart des Geräts ist IPX0, daher ist es verboten, Flüssigkeit mit Ausnahme der angegebenen Flüssigkeitsinjektionsöffnung auf die Maschine zu geben, um zu verhindern, dass versehentlich Flüssigkeit in die Maschine eindringt und einen Maschinenausfall verursacht. Sobald ein solches Phänomen festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein, schalten Sie den Hauptnetzschalter des Geräts aus und ziehen Sie den Netzstecker. Der Benutzer muss eine Antistatikschiulung erhalten, und das Lesen und Akzeptieren dieser Sicherheitswarnung ist eine davon. Außerdem ertönt bei jeder Nutzung der Warnhinweis auf antistatische Aufladung.
3. Der Ort, an dem das Gerät verwendet wird, sollte eine normale und geeignete Umgebungstemperatur und eine relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 45% ~ 93% haben. Halten Sie die Luftzirkulation jederzeit aufrecht!
4. Rauchen und Feuer in der Nähe ist verboten. Wärmequellen und Elektrische Felder können die Resultate verringern oder Teile des Generator beschädigen.
5. Dieses Gerät hat zwar elektromagnetische Verträglichkeit nach der CE. Der Verwendungsort sollte aber frei von Hochspannungsgeräten, statischer Elektrizität erzeugenden Geräten (z. B. Ozongeneratoren, Hochspannungsentladungsnetzteilen, ionisierende Luftreiniger) und anderen Hochfrequenz-Sendegeräten, Magnetfeldern oder Zündvorrichtungen und statischer Elektrizität sein, um Verbrennungen und Explosionen zu verhindern und die Wirksamkeit der BrownsGas Erstellung nicht zu verringern. **Auch in der MRT-Umgebung darf es nicht verwendet werden ;**

6. Tragbare und mobile Hochfrequenzkommunikationsgeräte können den normalen Gebrauch des Geräts beeinträchtigen.
7. Wenn Sie diesen AMS H03 verwenden, sollte es auf dem horizontalen Boden platziert werden. Vor dem Gebrauch sollte die erforderliche Wassermenge in den Haupttank, dem Zerstäubertank und dem Wasserverwirblertank vorne eingespritzt werden! **Die Maschine startet erst, wenn alles nach Vorgabe eingefüllt und der Nutzer eingegeben wurde.**
 - Wenn das Gerät abnormal oder beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden! Zu den typischen Mängeln gehören:
 - a) Beschädigung der Stromleitung;
 - b) Der Gehäuseschaden, der durch Herunterfallen und Alterung der Ausrüstung verursacht wird; Wasserleckage und Luftleckage des Wassertanks und der Wasserleitung usw.;
 - c) Hohe Temperatur oder abnormaler Alarmton von Geräten;
 - d) Wenn die Ursache eines Fehlers des Geräts nicht beseitigt wurde ;
 - e) Wenn ein anderes abnormales Phänomen auftritt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und ziehen Sie den Netzstecker.
8. Es ist verboten, Geräte oder Komponenten auszutauschen, die nicht den Anforderungen des Geräts entsprechen, was die elektromagnetische Verträglichkeit verringern, die Emission erhöhen oder die Störfestigkeit des Geräts verringern kann.
9. Das Gerät sollte nicht in der Nähe oder gestapelt mit anderen Geräten verwendet werden. Wenn es in der Nähe oder gestapelt mit anderen Geräten verwendet werden muss, sollte es bedient und überprüft werden, ob es in seiner Konfiguration normal funktionieren kann .
10. Jegliche Modifikation des Geräts ist verboten;
11. Ein Beatmungsschlauch, der mit dem Gerät verwendet werden sollte, muss über eine gültige Registrierungsbescheinigung für Medizinprodukte verfügen. Die mitgelieferten Schläuche sind speziell für dieses Gerät geeignet.
12. Die Kontaktmaterialien auf der Oberfläche des Geräts enthalten keine allergischen Substanzen;
13. Wenn das Gerät und das Zubehör entsorgt werden müssen, muss der Benutzer die Abfälle gemäß den medizinischen Vorschriften und anderen nationalen Vorschriften entsorgen.
 - Der Haupttank, der Befeuchtungs- und Zerstäubertank muss mit reinem Wasser (reines Wasser destilliertes Wasser ohne Verunreinigungen oder mit dem Wasser des AquaCells) befüllt werden);
 - Nur das vom Hersteller bereitgestellte oder empfohlene Zubehör sollte verwendet werden, da sonst das Gerät während des Gebrauchs Fehler aufweisen kann .
 - Die Wartung und der Austausch von Teilen der Geräte werden vom Hersteller oder der vom Hersteller benannten Kundendienstorganisation durchgeführt. Benutzer dürfen das Gerät nicht ohne Genehmigung demontieren.
 - Bitte achten Sie während des Betriebs des Geräts darauf, Fenster zur Belüftung zu öffnen, Feuerwerkskörper in Innenräumen zu verbieten und alle Arten von Reibung und statischer Elektrizität zu vermeiden, da es sonst zu einer Gasexplosion kommen kann.

Hygiene und Hinweise zur sicheren Verwendung



1.	Das Wasser im Befeuchtungsfiltermodul sollte mind. jede Woche und die Komponenten des nasalen Sauerstoffschlauchs / der Nasenmaske vor jedem Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden (*um eine bakterielle Besiedlungsinfektion zu vermeiden).
2.	Der nasale Sauerstoffschlauch / die Nasenmaske wird von einer einzelnen Person verwendet und kann nicht von vielen Personen geteilt werden, um eine Kreuzinfektion zu vermeiden
3.	Wenn das Gerät für behinderte Patienten verwendet wird, muss es von Personen mit normaler Verhaltensfähigkeit bedient werden (* um andere Verletzungen durch Geräteschäden zu vermeiden).
4.	Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (* vermeiden Sie es, versehentlich Kleinteile zu nehmen und den Körper zu beschädigen).
5.	Arbeiten Sie in strikter Übereinstimmung mit diesem Handbuch (* Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mehr und ziehen Sie den Netzstecker, wenn ein ungewöhnliches Phänomen auftritt).
6.	Berühren Sie die Steckdose nicht mit nassen Händen (* vermeiden Sie die Möglichkeit eines Stromschlags oder einer Verletzung).
7.	Machen Sie das Gerät nicht nass (* vermeiden Sie die Möglichkeit von elektrischen Leckagen und Schlägen;
8.	Ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose (*, um Leckagen, Stromschläge und Brände zu vermeiden).
9.	Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses kein Natriumhypochlorit- oder sonstige chemische Desinfektionsmittel (* Komponenten altern und können evtl. nicht verwendet werden).
10.	Bitte lassen Sie das Gehäuse, die Steckdose und den Schalter nicht fallen oder treten Sie nicht stark auf (*kann Schäden, Unbrauchbarkeit oder Stromschlag verursachen).

1 Produkteinführung

Die intelligente Wasserstoff-Sauerstoff-Maschine (speziell für die Atmung) besteht aus der Hauptmaschine (einschließlich Wasser- und Elektromodul, Wasserzerstäubermodul, Gasreinigungsmodul, Computersteuerungsmodul, Fronttank) und Zubehör (Nasensauerstoffschlauch / Nasenmaske).

Das Befeuchtungsfiltermodul ist eine abnehmbare Befeuchtungsflasche oder ein Luftbefeuchter. Das Gerät muss an die Beatmungsleitung oder den nasalen Sauerstoffschlauch angeschlossen werden. Die Beatmungsleitung und der nasale Sauerstoffschlauch werden vom Benutzer gekauft. Das Produkt sollte mit dem Registrierungszertifikat oder dem Aufzeichnungszertifikat als Medizinprodukt ausgestattet sein.

Diese Produktreihe elektrolysiert reines Wasser durch ein internes patentiertes Elektrolyseurmodul, um ein Browns Gas (HHO) zu erzeugen. Das Volumenverhältnis von Wasserstoff und Sauerstoff beträgt 2:1. Es enthält keine anderen Substanzen, was von vielen zertifizierten Drittorganisationen getestet wurden. Sie können sich an unser Verkaufspersonal wenden, um den Testbericht zu erhalten. Die Nenngasproduktion dieser Produktreihe beträgt 3000 ml / min.



2 Anleitung vor dem Gebrauch

2.1 Geltungsbereich

- Es kann in der häuslichen Pflege, im Wellness und im Anti-Aging eingesetzt werden und die Rehabilitation chronischer Krankheiten unterstützen.

2.2 Kontraindikationen

- Menschen, von denen bekannt ist, dass sie das Einatmen von Wasserstoff und Sauerstoff nicht vertragen
- Nur nach vorheriger Abklärung durch den Dr. Hydrogen´s Wasserstofftherapie Fragebogen

2.3 Umwelt

Das Gerät und jeder nasale Inhalationsschlauch sollte nur von einer einzelnen Person verwendet werden.

- Halten Sie den Einsatzort gut belüftet, der Ort darf nicht geschlossen sein und es darf kein offenes Feuer geben.
- Am Einsatzort sollten sich Feuerlöschvorrichtungen befinden.
- Das Gerät sollte während des Gebrauchs von verbrennungsfördernden Quellen (z. B. Sauerstofftank) ferngehalten werden.

2.4 Anforderungen an den Betreiber

Vor der Verwendung des Geräts sollten die Bediener geschult werden (lesen Sie die Bedienungsanleitung im Detail, sehen Sie sich das Betriebsanleitungsvideo an und akzeptieren Sie bei Bedarf die Telefon- oder Videoanleitung des Kundendienstpersonals) und die Betriebsspezifikationen und Vorsichtsmaßnahmen des Geräts vollständig verstehen.

- **Die Bediener sollten antistatische Kleidung tragen**
- Der Bediener muss sicherstellen, dass **um den Luftauslass (innerhalb von 1 m) kein offenes Feuer und keine statische Elektrizität vorhanden ist.**
- Hinweis: Achten Sie darauf, dass in dem Raum mit einer Fläche von weniger als 8 qm eine genügende Belüftung da ist. In den medizinischer Einrichtungen, wenn ein einzelnes Gerät 8 Stunden lang läuft, sollte der vertikale Abstand zwischen dem Gerät und anderen Geräten 30 cm betragen. Die gefährliche Wasserstoffkonzentration ist erst bei mehr als 4 % , Sobald das Gas austritt, ist schon nach 5 cm ab dem Gasaustritt die Konzentration unter 4 % , weil es sich mit der Umgebungsluft vermischt Zur Sicherheit sorgen Sie dafür dass Sie einen Meter Abstand haben zu möglichen Zündquellen (wie oben beschrieben)

2.5 Tägliche kumulative Benutzung

Je nach individuellem Bedarf wird empfohlen, es 30 Minuten bis 8 Stunden pro Person am Tag zu verwenden, Es kann mehrmals in Etappen verwendet werden kann.

Gehen Sie bitte bei der Nutzung nach dem Ergebnis des Fragebogens

2.6 Geräteaufbau / Systemkomponenten



Der Wasserstoffgenerator besteht aus folgenden Teilsystemen:

- Wasserstoffherzeugungssystem
- Wasserkreislaufsystem
- Luftkreislaufsystem
- Wärmeabführungssystem
- Filtersystem
- Sicherheitssystem
- Stromversorgungssystem
- Intelligentes Steuerungssystem
- Mensch-Maschine-Interaktionssystem
- Datenerfassungssystem
- Drahtloses Verbindungssystem
- Sensorsystem

Alle Systeme sind miteinander verknüpft, und das Steuerungssystem gewährleistet den effizienten und umweltfreundlichen Betrieb des Wasserstoffgenerators unter normalen Bedingungen. Das redundante Design des Sensorsystems und des Sicherheitsalgorithmus sichert das Sicherheitsniveau des Wasserstoffgenerators und ermöglicht die sichere Nutzung in verschiedenen Anwendungsbereichen.



3 Installation und Verwendung


3.1 AMS H03 Übersicht



3.2 Installationsanleitung

Nein.	Schritt	Illustration	Beschreibung
1.	Platzierung des AMS H03		Die Belüftung in Innenräumen muss aufrechterhalten werden und sollte auf dem ebenen Boden platziert werden, um sicherzustellen, dass alle Radfußbremsen eingerastet sind und der Abstand um die Ausrüstung zu Hindernissen mehr als 20 cm beträgt.
2.	Schalten Sie das Gerät ein		Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (gut geerdet). Der Schalter hinter dem Rumpf wird auf "Ein" gedrückt, um die Stromversorgung zu

			starten	
3.	Bereiten Sie gereinigtes Wasser $\geq 5-6$ Ltr vor		Dem Gerät kann nur reines Wasser vom AquaCell oder destilliertes Wasser zugesetzt werden.	
4.	Geben Sie gereinigtes Wasser in den Haupttank		Geben Sie langsam Wasser in den Wassereinlass. Das Voice ControlSystem sagt Ihnen wann sie langsamer einfüllen und wann Stop ist	
5.	Giessen sie 30 ml dest Wasser oder AquaCell Wasser in das Zerstäubermodul ein (zwischen den beiden roten Strichen)		Auch wenn Sie den Zerstäuber nicht verwenden müssen Sie den Tabk befüllen. Falls sie den Zerstäuber (Atomizer) verwenden, mus er je nacjh gebrauchv und Stärke der Zerstäubung nachgefüllt werden	
6.	Wasser in die Befeuchterflasche geben		Das Wasser in der Befeuchtungsflasche sollte zwischen Minimum und maximum anzeigen. Es sollte nicht zu hoch oder zu niedrig sein. Erneuern Sie täglich das Wasser in der Befeuchtungsflasche.	
7.	Installation der Befeuchtungsflasche		Drücken Sie mit dem Daumen den Einsatzknopf und entnehmen Sie den Tank oder setzen ihn ein	

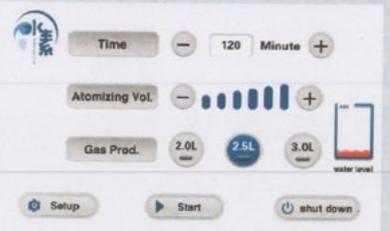8.	Bedienoberfläche		Tippen Sie auf das Display und folgen den Anweisungen	
9.	Nach Auswahl der Sprache geben Sie den ersten User ein		Wenn sei zuerst Start drücken, werden Sie aufgefordert den User zu bennen oder einzustellen	
10. 490	Dann zurück zu den Paramert und Flußmenge und Zeit eingeben, ggffs Atomizer einstellen		Dann startet das Gerät	

4 Technische Parameter

Modell	BYT_EU-H03
Gasförderung	3000ml/min ±10%
Gaszusammensetzung	66,6 %H ₂ 33,3 %O ₂
Eingangsspannung	110V-220V 50/ 60 Hz
Nennleistung	800 W 15 A
Größe	470*240*490 Millimeter
Nettogewicht	18 Kg
Anwendbare Wasserqualität	gereinigtes Wasser
Verneblerverbrauch	>30 ml/st
Verneblerwasservolumen	10 ml
KI Klassifizierung der Elektrischen Sicherheit	Klasse I Equipment
Flüssigkeitssicherheit	IP 21
Operationsmodus	24 Std kontinuierlich

Dieses Produkt dient der Erzeugung von frischer befeuchteter Luft in Räumen und Büros

5 Regelmäßige Wartung

5.1 Methoden zur Produktwartung

Projekt	Inhalt der Inspektion	Frequenz	Art der Handhabung
Befeuchtungsflasche	Gibt es Ablagerung oder Fremdkörper in der Flasche?	Vor jedem Gebrauch	Reinigung und Sterilisation
	Ist das Blasen produzierende Teil blockiert?		Reinigen
Host-Computer	Wartungszyklus	800h/Zeit	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst

- Der Austauschzyklus der Befeuchtungsflasche beträgt weniger als 3 Monate
- Die Stromversorgung muss vor der Reinigung und Wartung des Geräts unterbrochen werden .
- Es ist verboten, das Gerät mit organischen Lösungsmitteln wie Benzol und Bananenwasser zu schrubben.
- Bitte trennen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden muss.

5.2 Wartungsschritte

Nein.	Schritt	Diagramm	Beschreibung
1	Wasser ablassen		
2	Entwässerung		Führen Sie das Ende des Abflussrohrs mit Kunststoffverbindung direkt in den Abflussauslass ein, um es abzulassen, bis das Wasser in der Maschine vollständig abgelassen ist. Beobachten Sie, ob das abgelassene Wasser klar und farblos ist. Wenn es abnormal ist, fügen Sie kontinuierlich Wasser in den Wassereinlass hinzu, um zu spülen, bis das abgelassene Wasser sauber ist.
3	Reinigung abgeschlossen		Drücken Sie nach der Reinigung auf den runden Kunststoff-Schnellverschluss und ziehen Sie das Abflussrohr heraus.
4	Wieder Wasser hinzufügen		Nehmen Sie den Ersatzelektrolyten heraus, fügen Sie Wasser hinzu und schütteln Sie ihn gut, dann gießen Sie ihn in den Wassereinlass. Geben Sie weiterhin reines Wasser in den Wassereinlass, bis die Maschine aufhört zu alarmieren und der Wasserstand unter die obere Grenze des Wasserstandes fällt.

5.3 Fehlerbehebung

Nein.	Fehler	Mögliche Ursachen	Behandlungsmethode
1	Die Hauptschalterleuchte leuchtet, keine andere Reaktion	Interner Stromausfall des Geräts.	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine After-Sales-Anleitung zu erhalten.
2	Die Hauptschalterleuchte funktioniert nicht	Stromausfall Stromunterbrechung.	Prüfen Sie, ob das Netzteil eingesteckt oder die Steckdose nicht eingeschaltet ist. Andere Steckdosen können zu Testzwecken ausgetauscht werden.
		Gerätesicherung durchgebrannt.	Darin befindet sich eine Ersatzsicherung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine After-Sales-Anleitung zu erhalten.
3	Schwarzer Bildschirm	Touchscreen-Fehler.	Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine Anleitung zur Kalibrierung zu erhalten.
4	Keine Reaktion auf Bedienung		
5	Blauer Bildschirm oder Tastenversatz		
6	Nach dem Hinzufügen von Wasser bis zur oberen Grenze des Wasserstandes ist das Gerät immer noch zu wenig Wasser und gibt einen Alarm aus	Die Maschine ist schon lange im Einsatz.	Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Gerätewartung zu erhalten.
		Ist das Abflussrohr richtig verbunden?	
7	Es gibt keine Blasen in der Befeuchtungsflasche	Das Auslassrohr ist nicht eingesteckt.	Setzen Sie den Gasauslass wieder ein.
		Die Abdeckung des Wassereinlasses ist nicht festgezogen.	Ziehen Sie die Abdeckung wieder fest.
		Die Maschine funktioniert nicht richtig, um Gas zu erzeugen.	Wenden Sie sich nach dem Neustart an den Hersteller, um weitere Informationen zu erhalten.
8	Die Montagefuge ist nicht dicht	Die Befeuchtungsflasche ist nicht festgezogen.	Abschrauben und wieder

			festziehen.
		Der nasale Sauerstoffschlauch / die Nasenmaske ist nicht richtig drin.	Wiederherstellen.
		Der nasale Sauerstoffschlauch / die Nasenmaske ist beschädigt und gealtert.	Ersetzen Sie es durch ein neues.
Hinweis: Wenn der Fehler nicht selbst behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder senden Sie das Produkt zur Wartung an die angegebene Wartungsstelle unseres Unternehmens zurück. Die Kontaktinformationen für die Wartung finden Sie auf der Garantiekarte.			

5.4 Transport von Produkten

1. Jedes Gerät muss in einem speziellen Verpackungskarton aufbewahrt werden, der mit Sorgfalt, Regenschutz und anderen Zeichen gekennzeichnet ist, um sicherzustellen, dass das Produkt beschädigt wird.
2. Das Produkt muss fest in der Schachtel positioniert sein, und die Kontaktfläche mit dem Produkt muss mit weichem Kissenmaterial gepolstert sein, um Schäden durch Lockerung oder gegenseitige Reibung während des Transports zu vermeiden.
3. Wenn das Produkt transportiert werden muss, darf sich **keine** Flüssigkeit im Elektrolyseur, Wassertank, Befeuchtungsflasche usw. befinden.
4. Während des Transports ist es strengstens verboten, horizontal, kopfüber, nass oder direktes Sonnenlicht, stoßfest und stoppend zu liegen (Alle vier Räder müssen verriegelt sein).
5. Bedingungen für die Transportumgebung:
 - 1) Umgebungstemperatur: - 40 °C ~ 55 °C;
 - 2) Relative Luftfeuchtigkeit: 0% RH ~ 93% RH;
 - 3) Atmosphärischer Druck: 860hpa ~ 1060hpa.

5.5 Produktlagerung

- 5.6 Die verpackte Maschine ist mit 0 °C ~ 40 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 93%, einem korrosiven Gas und einer guten Belüftung leicht im Raum zu lagern.

Beschreibung der Label-Symbols:



BF-

Sei vorsichtig!

Regen

Vermeiden Sie

Transport- und

Anwendungsteil

Weitere Informationen finden Sie in den beigefügten Dokumenten.

vermeiden Trocken halten

die Sonne

Lagertemperatur Bei - 40 °C ~ 55 °C



Transport- und Lagerfeuchte bei 0% ~ 93% RH

Achten Sie auf brennbare Gase

Keine Zündung und Rauchen

Kein Anzünden


Antistatisch

报告编号/Report No.: KHD01280QHPLEBN-10 日期/Date: 2020.12.8

测试条件/ Test Conditions: 湿度: 24.9 °C 湿度: 60 RH% 大气压: 103.3 kPa

检测项目 / Test Item	单位 / Unit	检测标准 / Test Standard	检出限 / MDL	检测结果 / Result
氮 (N ₂) 含量	% (v/v)	GB/T 3634.1-2006	/	66.54
氧 (O ₂) 含量	% (v/v)	GB/T 3634.1-2006	0.01	33.46

图 1-1 样品谱图

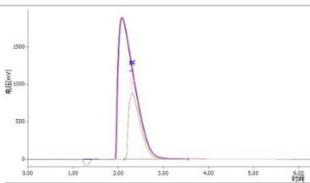

峰号	保留时间 (min)	峰面积 (Area)	峰高 (Height)	峰宽 (Width)
1	2.05	100000	10000	0.1

未完待续

峰号	保留时间 (min)	峰面积 (Area)	峰高 (Height)	峰宽 (Width)
1	2.05	100000	10000	0.1
2	2.10	10000	1000	0.1

未完待续

未完待续

样品名称 / Sample Name	测试日期 / Test Date	测试标准 / Test Standard	测试地点 / Test Location
样品编号 / Sample Number	测试人员 / Test Operator	测试方法 / Test Method	测试仪器 / Test Instrument
送检单位 / Referring Unit	报告日期 / Report Date	报告编号 / Report Number	报告人 / Reporter
检测项目 / Test Item	检测方法 / Test Method	检测标准 / Test Standard	检测结果 / Test Result
检测结论 / Test Conclusion	检测日期 / Test Date	检测地点 / Test Location	检测人员 / Test Operator

报告人: 方静

审核人: [Signature]

检测日期: 2020.12.08

检测地点: [Location]

Gewährleistungsverordnung

Die Garantie gilt ab Kaufdatum gewartet. Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum kann das spezielle Wartungszentrum des Unternehmens im Falle eines Fehlers, der durch nicht-menschliche Faktoren verursacht wird, überprüfen, ob eine Fremdverschuldung vorliegt. Folgendes ist nicht von der Garantie abgedeckt:

- 1) Schäden, die durch nicht vorschriftsgemäße Bedienung und Verwendung verursacht werden.
- 3) Pflegen Sie die für den Elektrolyseur erforderlichen Verbrauchsmaterialien regelmäßig.

Diese Karte kann nur vom Benutzer verwendet werden und kann nicht auf andere übertragen werden, andernfalls kündigt das Unternehmen sein kostenloses Wartungsrecht.

Bitte passen Sie gut auf diese Karte auf. Wenn Sie es reparieren müssen, wenden Sie sich bitte mit dieser Karte oder Kaufnotiz an das spezielle Wartungszentrum.

Wenn sich die Adresse und Telefonnummer ändern, informieren Sie bitte rechtzeitig die Wartungszentrale.

Garantiekarte

Benutzername:	Rechnung-Nr.:
Kaufdatum:	Maschinenmodell:
Benutzeradresse:	Telefon:
Wartungszentrum:	

Kundenservice-Bilanz

Ursache des Versagens	Ergebnis der Verarbeitung	Unterschrift des After-Sales-Personals	Benutzersignatur

Bitte bewahren Sie diese Seite im After-Sales-Service-Center auf.

WICHTIG: Diese Gerätereihe gehört trotz Medizinzulassung in China in Europa NUR zu den Wellness und Kosmetikprodukten

Europavertretung, Vertrieb, Kundendienst und Service:

Dr Hydrogens Wasserstoff-Therapie UG

Tekkenhof 12, 47495 Rheinberg

Telefon: +49 2843 95 871 60

info@asclepiuseuropa.de

www.asclepiuseuropa.de

