


# คู่มือการใช้งาน

สำคัญ : ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือนี้ไว้

camera®

BRAND: CAMERA

MODEL: C-WW8100

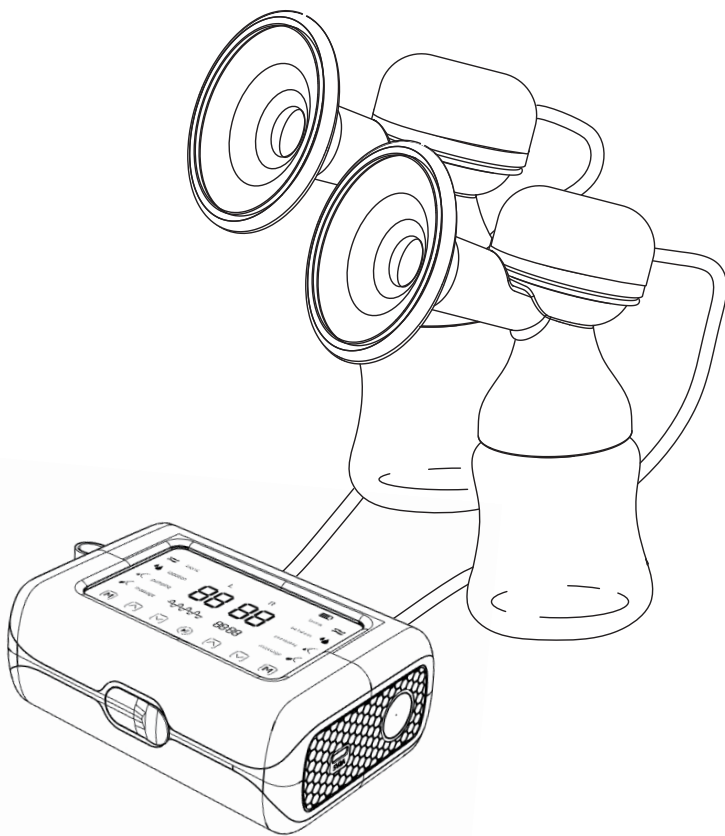

สำคัญ : ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์  
และเก็บคู่มือนี้ไว้



## ความปลอดภัยที่สำคัญ

1. อ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
2. เมื่อใช้อะแดปเตอร์ โปรดใช้กับแรงดันไฟที่ถูกต้อง (AC 100-240V/DC5V,2A)
3. หากสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องถูกเปลี่ยน ปรีกษาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
4. ควรใช้อะแดปเตอร์ไฟที่มาพร้อมกับปืมนม
5. ห้าม แชนต์วเครื่อจ, สาย Type-C , อะแดปเตอร์ ในน้ำ
6. อย่าใช้ในขณะที่นอนหลับหรือร่ววนนอนมากเกินไป
7. เก็บชิ้นส่วนทุกชิ้นให้ห่างจากการเข้าถึงของเด็ก ห้ามให้เด็กเล่นกับเครื่องนี้
8. ถอดปลั๊กไฟจากตัวเครื่องทุกครั้ง เมื่อชาร์จไฟเต็ม หรือไม่ได้ใช้งาน
9. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลที่ทุพพลภาพทางร่างกายหรือสติปัญญาหรือขาดประสบการณ์ ควรได้รับการแนะนำและการดูแลเกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกต้องและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง



ชิ้นส่วนที่มีแพนวงจรไฟฟ้า ห้ามบ่น่าเชื้อ ห้ามล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ



ซิลิโคนครอบกรวยปืมนไม่ควร อบแห้ง


### ข้อมูลทางเทคนิค

|                 |            |
|-----------------|------------|
| แรงดันไฟ        | DC 5V/2A   |
| การใช้ไฟฟ้า     | 5V --- 2A  |
| แรงปืม          | ≤ 300 mmHg |
| ระดับการทำงาน   | 4 โหมด     |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3000 mAh   |

### คุณสมบัติ

1. มี 4 โหมดให้เลือก โหมดไดโวนิก โหมดนวด โหมดกระตุ้น และโหมดรีด ตามความเหมาะสมที่คุณจะเลือกได้
2. แบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ คุณภาพสูง แบตเตอรี่ชาร์จได้รวดเร็ว
3. ชาร์จได้ทุกที่ สาย Type-C ที่มาพร้อมเครื่องสามารถชาร์จได้กับพาวเวอร์แบงก์ / อะแดปเตอร์ (ไม่รวมมากับสินค้า)
4. มีการออกแบบเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ ไม่ต้องกังวลว่าน้ำนมจะไหลย้อนกลับมาและทำให้ตัวเครื่องเมื่อใช้งาน
5. ปรับระดับและโหมดการใช้งานตามต้องการอิสระ ช่าย-ขวา

## ส่วนประกอบ

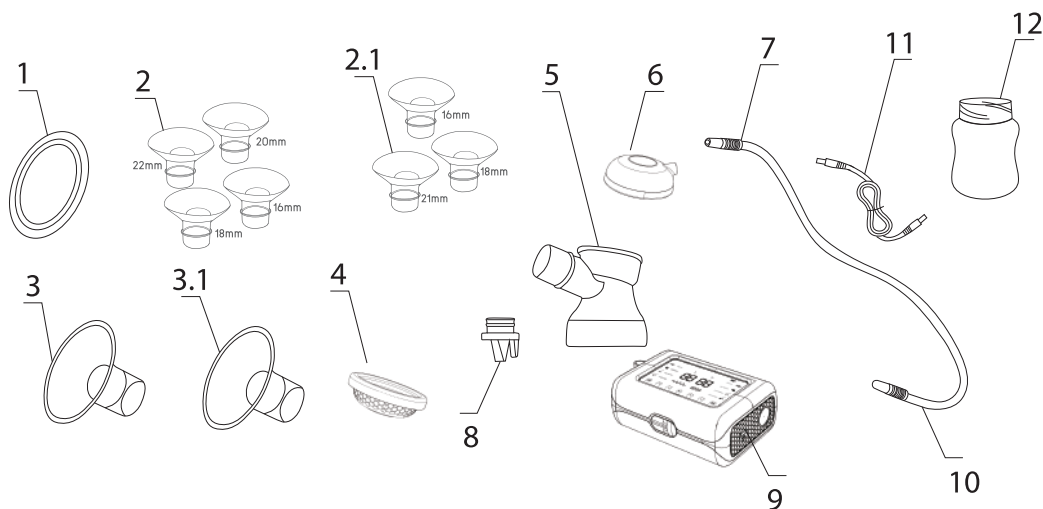


| ลำดับ | ชื่อส่วนประกอบ                                                                                             | วัสดุ    | อุณหภูมิการใช้งาน | จำนวน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|
| ①     | ฝาปิดกรวยปั๊มบนกันฝุ่น                                                                                     | PP       | -20~120°C         | 2     |
| ②     | ซิลิโคนปรับตามความกว้างของหัวนม<br>ไซส์ 22มม., 20มม., 18มม., และ 16 มม.<br>(ใช้สำหรับกรวยปั๊มโพลีโพรพิลีน) | silicone | -20~200°C         | 8     |
| ②.1   | ซิลิโคนปรับตามความกว้างของหัวนม<br>ไซส์ 21มม., 18มม., และ 16 มม.<br>(ใช้สำหรับกรวยปั๊มซิลิโคน)             | silicone | -20~200°C         | 6     |
| ③     | กรวยปั๊มโพลีโพรพิลีน                                                                                       | PP       | -20~120°C         | 2     |
| ③.1   | กรวยปั๊มซิลิโคน                                                                                            | silicone | -20~200°C         | 2     |
| ④     | ตัวสูบก้นย่น                                                                                               | silicone | -20~200°C         | 2     |
| ⑤     | ตัวปั๊มนม                                                                                                  | PP       | -20~120°C         | 2     |
| ⑥     | ฝาปิดตัวสูบก้นย่น                                                                                          | PP       | -20~120°C         | 2     |
| ⑦     | แกนเสียบท่ออากาศ                                                                                           | PP       | -20~120°C         | 4     |
| ⑧     | ปากเปิด                                                                                                    | silicone | -20~200°C         | 2     |
| ⑨     | ตัวเครื่อง                                                                                                 | ABS      | -20~80°C          | 1     |
| ⑩     | ท่ออากาศ                                                                                                   | PP       | -20~120°C         | 2     |
| ⑪     | สาย Type-C (หัว-ท้าย)                                                                                      | -        | -                 | 1     |
| ⑫     | ขวด PPSU                                                                                                   | PPSU     | -20 ~ 180 °C      | 2     |

หมายเหตุ: หากชิ้นส่วนใดๆ ขาดหรือเสียหาย โปรดติดต่อสอบถามอะไหล่ได้ที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย


# วิธีการประกอบ

ทำความสะอาดมือของคุณและปั๊มนมก่อนใช้งาน

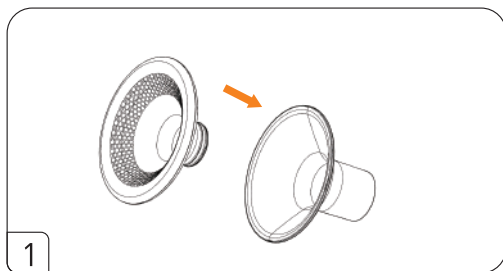

1

1. สวม**ซิลิโคนครอบกรวยปั๊ม**เข้ากับ**กรวยปั๊ม** และกดรอบขอบกรวยปั๊ม  
มั่นใจว่าได้แนบสนิทไม่มีรอยยับ

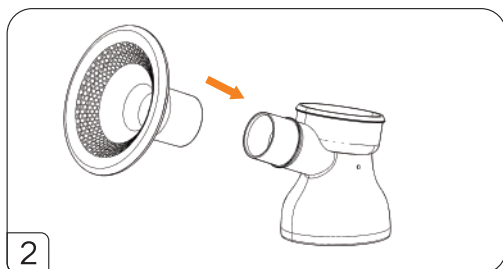


2

2. สวม**กรวยปั๊ม**ที่ประกอบเสร็จจากขั้นตอนที่ 1 เข้ากับท่อต่อของ**ตัวปั๊ม**  
(เมื่อต้องการถอดออก ให้ใช้มือหนึ่งจับ**กรวยปั๊ม** และอีกมือหนึ่งจับ**ตัวปั๊ม** และกดแยกออกจากกัน)



3


3. ใส่**ตัวสูบลม**กับ**ยอน**ลงไปด้านบนของ**ตัวปั๊ม** และปิดด้วยการหมุน**ฝาปิดตัวสูบลม**กับ**ยอน**

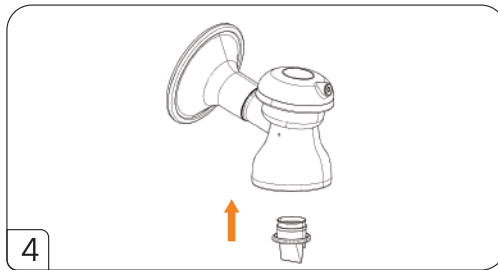

4. ติดตั้งหัววาล์วปากเปิด โดยใส่หัววาล์วปากเปิดเข้ากับตัวปั๊ม  
มั่นใจว่าได้แบบสันนิทไม่มีร่องอากาศติดค้าง




5. หมุนตัวปั๊มที่ประกอบเสร็จจากขั้นตอนที่ 4 เข้ากับขวดนมปากกว้าง  
(แนะนำให้ใช้ขวดนมที่มีเกลียวเป็นมาตรฐาน เช่น CAMERA, Avents)

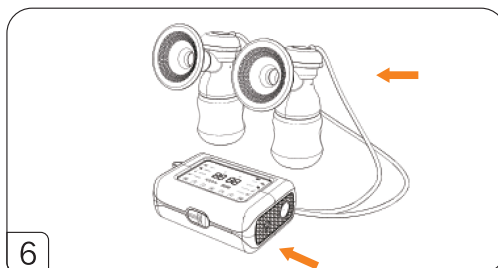

6. ติดตั้งท่ออากาศเชื่อมเข้ากับตัวเครื่องและตัวปั๊ม โดยเสียบ  
แกนเสียบท่ออากาศเข้ากับจุดต่างๆ ตามรูป มั่นใจว่าได้เสียบเข้าอย่างสนิท

## สัญลักษณ์ของปั๊ม, หน้าจอและคำแนะนำการใช้

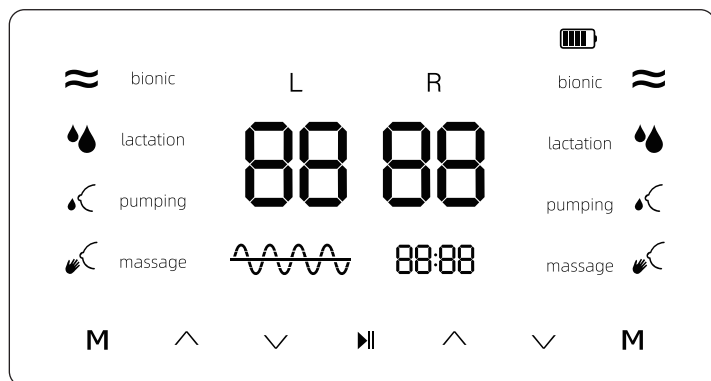


### คำแนะนำการใช้ปั๊ม:

|   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| M | Select mode button    | ▶ | Play/Pause button     |
| ^ | Increase level button | ▼ | Decrease level button |

### คำแนะนำสัญลักษณ์การแสดงผลหน้าจอ

| L         | ปั๊มซ้ายซ้ายกำลังทำงาน                                                                                  | R     | ปั๊มขวาขวากำลังทำงาน                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| bionic    | โหมดไดโอดอนิก พสมพสานการทำงาน<br>ของกระตุ้นและรัด ปรับได้ 15 ระดับ                                      |       | แสดงเวลาที่ของการปั๊ม                                                      |
| lactation | โหมดกระตุ้น ปั๊มสลับสั่นและยาว<br>ในจังหวะที่เหมาะสม ปรับได้ 9 ระดับ                                    | 88:88 | แสดงเวลาการทำงาน<br>อุปกรณ์จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ<br>ทำงานเป็นเวลา 30 นาที |
| pumping   | โหมดรัด ปั๊มเติมกำลังด้วยความถี่เสมอกัน<br>ในแต่ละระดับ ระดับยิ่งสูง ความถี่ยิ่งต่ำ<br>ปรับได้ 15 ระดับ |       | สัญลักษณ์พลังงานแบตเตอรี่                                                  |
| massage   | โหมดนวด ปั๊มบ่มนวดด้วยจังหวะ<br>ความถี่ที่เสมอกันปรับได้ 9 ระดับ                                        | 88    | แสดงระดับความแรงของการ<br>ปั๊ม แยกซ้ายขวา                                  |

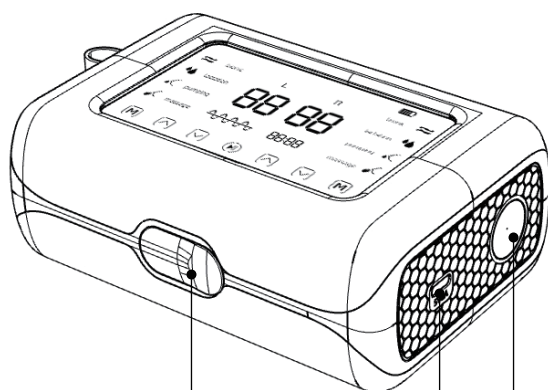

ปุ่มเปิด/ปิด: กดค้างเพื่อเปิดและปิด  
กดแล้วปล่อยเพื่อเปิด/ปิดไฟแสดงผล  
หน้าจอ (เหมาะสำหรับกลางคืน)

Type-C slot

Pump connecting slot

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนของปั๊มนมถูกนำเชื้อและปฏิบัติตามคำแนะนำ  
เพื่อติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน กรุณาล้างมือสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหมาดๆ  
นวดบริเวณเต้านมก่อนใช้ หลังการนวด นึ่งในท่าที่สบายในการใช้งาน  
(นอนราบไม่ได้) ให้ตรรกกลางของซิลิโคนครอบกรวยปั๊มอยู่ตรงตำแหน่งหัวนม  
และยึดกับเต้านมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศเข้าและแรงดูดเป็นปกติ

★ เมื่อปีมนมควรอยู่ในท่าที่ถูกต้อง, อย่างนอนตะแคงเพื่อป้องกันน้ำนมไหลย้อนกลับ



★ ควรให้ตัวสูกับย่อนให้แห้งสนิทหลังจากทำความสะอาดหรือ  
ปั๊มน้ำเชื้อ โปรดอย่านำท่ออากาศนี้มาปั๊มน้ำเชื้อ  
(ท่ออากาศนี้ไม่ใช่ท่อที่สัมผัสกับน้ำนม)



## การแก้ไขปัญห

หากทำงานเบาหรือไม่ทำงาน

1. โปรดตรวจดูว่ารูปแบบของซิลิโคนครอบกรวยปั๊มว่ามีขนาดพอดีกับรอบๆ เต้านม
2. โปรดตรวจดูการเชื่อมต่อของตัวปีมนมและตัวเครื่อง
3. โปรดตรวจดูว่ากรวยปั๊มมีความแน่นสนิทพอดีและเชื่อมเข้ากับตัวปีมนมแล้ว
4. โปรดตรวจดูว่าสายท่ออากาศยาวเสียบบถูกต้อง ที่รูท่ออากาศของตัวเครื่อง  
ไม่ใช่รูสายไฟ
5. โปรดตรวจจาลิ้น กรดเป็นหัววาล์วลิ้นพลาสติก ควรตรวจว่าแผ่นวาล์ว แบบสนิทกับหัววาล์วหรือไม่  
กรดเป็นปากเปิด ตรวจว่ามีฝุ่นหรือเส้นผมติดบริเวณรูปดบริเวณปากเปิดหรือไม่

## การนำเชื้อ

1. คุณสามารถเลือกใช้ หมอนี่นำเชื้อของ CAMERA เพื่อนำเชื้ออุปกรณ์ปีมนมและขวดนม

⚠ **ชิ้นส่วนที่มีแพรวางจรไฟฟ้า ห้ามนำเชื้อ ห้ามล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ**

⚠ **ซิลิโคนครอบกรวยปั๊มไม่ควร อบแห้ง**

## คำเตือน

1. ส่วนที่เป็นแพรวางจรไฟฟ้าและอะแดปเตอร์ไม่ต้องนำเชื้อและไม่ให้นำไปทำความสะอาด
2. โปรดแน่ใจว่าตัวสูกับย่อนแห้งสนิทหลังการนำเชื้อ ก่อนนำไปใช้ปั๊มนม
3. ท่ออากาศ, ฝาปิดตัวสูกับย่อนและตัวสูกับย่อน ต้องแห้งสนิทหลังจากการนำเชื้อ ก่อนนำไปใช้ปั๊มนม

## แนะนำ:

ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรชาร์จไฟให้เต็มก่อน หลังใช้งานเสร็จ ควรถอดเครื่องออกและเทน้ำนมออกจากที่  
เก็บน้ำนม ใส่ขวดนม ปิดฝา และเก็บน้ำนมแช่ แช่ตู้เย็นโดยใช้น้ำแข็ง และเก็บอุปกรณ์ชาร์จ ทำความสะอาด  
ชิ้นส่วนอื่นๆ (ยกเว้นตัวเครื่อง) และนึ่งบอแห้งด้วยเครื่องนึ่งขวดนม หากคุณไม่ต้องการปั๊มนมลูกทันที  
โปรดเก็บน้ำนมไว้ในตู้เย็น

## การแก้ไขปัญห

หากทำงานเบาหรือไม่ทำงาน

1. โปรดตรวจดูว่ารูปแบบของซิลิโคนครอบกรวยบีบว่ามีขนาดพอดีกับรอบๆ เต้านม
2. โปรดตรวจดูการเชื่อมต่อของตัวปั๊มนมและตัวเครื่อง
3. โปรดตรวจดูว่ากรวยบีบมีความแน่นสนิทพอดีและเชื่อมเข้ากับตัวปั๊มนมแล้ว
4. โปรดตรวจปากเปิด ตรวจว่ามีฝุ่นหรือเส้นผมติดบริเวณรูปลงรูเปิดปากเปิดหรือไม่

## การนำเชื้อ

1. คุณสามารถเลือกใช้ หม้อนึ่งน้ำเชื้อของ CAMERA เพื่อนำเชื้ออุปกรณ์ปั๊มนม


⚠ **ชิ้นส่วนที่มีแผงวงจรไฟฟ้า ห้ามนึ่งน้ำเชื้อ ห้ามล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ**

⚠ **ซิลิโคนครอบกรวยบีบไม่ควร อบแห้ง**

## คำเตือน

1. ส่วนที่เป็นแผงวงจรไฟฟ้าและอะแดปเตอร์ไม่ต้องนำเชื้อและไม่ใช้น้ำทำความสะอาด
2. โปรดแน่ใจว่าตัวสับกันย้อนแห้งสนิทหลังการนึ่งน้ำเชื้อ ก่อนนำไปใช้งาน


## วิธีการเก็บน้ำนม

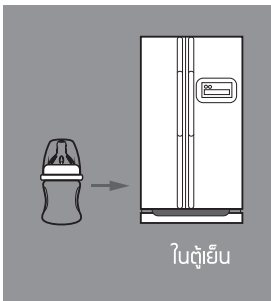

วิธีเก็บนมในตู้เย็น :

1. คุณสามารถเก็บน้ำนมในตู้เย็นได้ 48 ชม. ด้วยอุณหภูมิ 4 องศา
2. เมื่อแช่แข็งน้ำนม ให้เหลือพื้นที่ในช่องสำหรับการขยายตัวของน้ำนม
3. ไม่เก็บน้ำนมในชั้นวางที่ประตูของตู้เย็น
4. เพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการของน้ำนม ให้ปล่อยละลายในตู้เย็นข้ามคืนหรือใช้ที่อุ่นนมและตั้งอุณหภูมิ 40 องศา
5. ไม่ละลายหรืออุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ

## วิธีการอุ่นนม

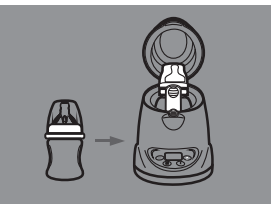

วิธีการอุ่นนม :

1. คุณสามารถเลือกใช้ที่อุ่นนม CAMERA เพื่ออุ่นนมได้ทันที
2. ไม่ละลายนมแช่แข็งในไมโครเวฟหรือในกระทะที่น้ำเดือด (ระมัดระวังจากการเผาไหม้)



LINE Official : @CAMERABABY



[www.facebook.com/camerababy](http://www.facebook.com/camerababy)



[www.camera.co.th](http://www.camera.co.th)



T.D.M Shanghai  
North Waterfront Place, Shanghai

สั่งให้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยดำรงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
สำนักงานใหญ่ : 1137-1139 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
ฝ่ายบริการ : 206 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

☎ 02-321-2721-3    camerababy    @camerababy

[info@camera.co.th](mailto:info@camera.co.th)    [www.camera.co.th](http://www.camera.co.th)