

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı

Medical Skin Wipe cilt dostu, alkol ve parfüm içermeyen bir temizlik mendilidir. Medical Skin Wipe'in kullanım amacı:

- ciltten fazla yağı temizleyerek yapışkan ürünlerin uygulanmasından önce cildi hazırlamak.
- yapışkan ürünlerin kullanımı bittiğinde ciltten çıkarılmasını desteklemek.

Medical Skin Wipe'in eğitimli tıp çalışanları ve ayrıca tıbbi eğitimi olmayan kişilerce kullanılması amaçlanmaktadır.

Endikasyonları

- Medical Skin Wipe yapışkan ürünlerin uygulanmasından önce cildin hazırlanması için endikedir.
- Medical Skin Wipe yapışkan ürünlerin ve ciltteki yapışkan kalıntıların çıkarılmasını desteklemek için endikedir.

Kontrendikasyonları

- Medical Skin Wipe içeriğindeki maddelere bilinen alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
- Medical Skin Wipe açık yaralarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar

Medical Skin Wipe bebeklerde yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Medical Skin Wipe sağlam ciltte kullanıma yöneliktir. Medical Skin Wipe kullanımıyla ilgili inatçı cilt tahrişi meydana gelirse lütfen bir sağlık çalışanı ile iletişim kurun. Furine ApS, bu ürünün Furine ApS'nin mevcut önerilerini ihlal edecek şekilde kullanılması halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan veya kayıptan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ek bilgiler

Ürünün kullanımıyla ilgili ciddi yaralanma (kaza) olması halinde lütfen yerel distribütörünüzle veya üreticiyle ve ayrıca yerel yetkili makamınızla iletişim kurun.

Daha fazla bilgi almak veya teknik yardım için lütfen bizimle www.furine.com aracılığıyla iletişim kurun.

Siloksan İçerir

Kullanım Talimatları

Yapışkan ürünlerin uygulanmasından önce cildin hazırlanması:

Saşeyi açmak için yırtın ve mendilin katını açın.

Yapışkan ürünün yerleştirileceği alandaki cildi nazikçe ovarak silin.

Önceki uygulanmış cilt ürünleri kalıntısının tamamen temizlendiğinden emin olun.

Yapışkan ürünlerin çıkarılması:

Bir Medical Skin Wipe ile kenarı boyunca nazikçe ovalayarak yapışkan ürünün kenarını gevşetmeye başlayın. Ciltten ayrılması için yapışkan ürünün altında da Medical Skin Wipe ile ovalamaya devam edin.

Ürünün çıkarılması sırasında bir mendil kurursa onu atın ve yeni bir mendil kullanın.

Kurumuş mendilleri kullanmayın.

Bir yapışkan ürünün çıkarılmasından sonra ikinci bir Medical Skin Wipe kullanarak yapışkan kalıntısı ciltten temizlenir.

Kullanılmış mendilleri normal ev atıklarıyla atın

Furine, İngiltere ve AB'de tescilli bir ticari markadır.



CE işaretli cihaz



Tek kullanımlık



Steril değildir



Yasal Üreticisi
Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Danimarka



Kullanım Talimatlarına
başvurun



Son kullanma tarihi
Birincil ambalaja bakın

Sürüm : IFUXA00-05TR
2024-03



30°C
5°C
Saklama koşulları



Seri kodu
Birincil ambalaja bakın



Referans kodu
A00TR11



Tıbbi Cihaz



Lateks içermez



Son derece
yanıcı