

Tootekirjeldus ja sihtotstarve

Medical Adhesive Remover on õrnatoimeline siloksaanil põhinev alkoholivaba spreid. Medical Adhesive Remover aitab kleepainet naha küljest hõlpsamalt eemaldada.

Medical Adhesive Remover muudab kleepaine eemaldamise valutuks. Spetsiaalne pihustusotsik võimaldab suunata vahendi kindlale nahapiirkonnale, vältides toote raiskamist ja inimeste kokkupuudet aerosooliga. Medical Adhesive Remover sobib kasutamiseks nii väljaõppinud tervishoiutöötajatele kui ka tavainimestele.

Näidustused

Medical Adhesive Removerit kasutatakse naha küljest kleepainete hõlpsamaks eemaldamiseks.

Vastunäidustused

Medical Adhesive Removerit ei tohi kasutada isikutel, kes on toote koostisosade suhtes teadaolevalt allergilised. Medical Adhesive Removerit ei tohi kasutada lahtistel haavadel.

Hoiatused

Medical Adhesive Removerit tohib imikutel kasutada vaid meditsiinilise järelevalve all.

Medical Adhesive Remover on ette nähtud kasutamiseks vigastamata nahal.

Kui Medical Adhesive Removeri kasutamisel esineb püsivat nahaärritust, pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Vältige toote kasutamist õrnal/tundlikul nahapiirkonnal (haavadel, silmadel, limaskestadel). Vältige vahetut sissehingamist. Eriti tuleohtlik aerosool. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C / 122 °F.

Lisateave

Tootega seotud raske kehavigastuse (õnnetusjuhtumi) korral võtke ühendust meie kohaliku turustaja või tootjaga ja kohaliku pädeva asutusega.

Kui vajate lisateavet või tehnilist abi, võtke meiega ühendust veebilehel www.furine.com.

Furine ApS ei võta endale vastutust kahjustuste ega kahjude eest, mis võivad kaasneda Furine ApS-i hetkel kehtivate soovitude eiramisega.

Koostisosad

Siloksaan, propellant, võib sisaldada mikrokoguses parfüümi.

Kasutusjuhend

Pihustage Medical Adhesive Removerit kleeptoote serva ümber ja oodake paar sekundit.

Eemaldage kleeptoode ettevaatlikult naha küljest, pihustades vajaduse korral veel Medical Adhesive Removerit. Vajaduse korral pühkige nahka seejärel salvrätiga.

Toode kuivab mõne sekundiga ega mõjuta hiljem samas kohas kasutatavate kleeptoodete kleepuvust.

Furine is a registered trademark in the UK and the EU

Juriidiline tootja:
Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Taani

 30°C
5°C Säilitustingimused

 Meditsiiniseade

 Ettevaatust! – Lugege kasutusjuhendit

 Steriliseerimata

 Kõlblik kuni
Märgitud põhipakendile

 Partitähis
Märgitud põhipakendile

 Hoida eemal päikesevalgusest

 Vastab EL-i aerosoolitoodetele kehtestatud nõuetele

 CE-märgisega seade

Versioon: IFUxA01-05EE
2024-03

 Tootekood
A01EE10

 Eriti tuleohtlik