



# Medical Adhesive Remover

## Medikal Yapışkan Çıkarıcı

### Ürün Tanımı ve kullanım alanı

Medical Adhesive Remover nazik, siloksan bazlı, alkol içermeyen bir spreydir. Medical Adhesive Remover'ın kullanım amacı yapışkan ürünlerin ciltten çıkarılmasını desteklemektir. Medical Adhesive Remover yapışkanın ağrısız şekilde çıkarılmasını mümkün kılar. Yönlendirme özellikli sprey ucu, spreyi odaklanılan cilt bölgesine yönlendirerek hem ürün israfını hem de aerosol temasını en aza indirir. Medical Adhesive Remover'ın eğitimli tıp çalışanları ve ayrıca tıbbi eğitimi olmayan kişilerce kullanılması amaçlanmaktadır.

### Endikasyonları

Medical Adhesive Remover yapışkan ürünlerin ciltten çıkarılmasını desteklemek için endikedir.

### Kontrendikasyonlar

Medical Adhesive Remover içeriğindeki maddelere bilinen alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Medical Adhesive Remover açık yaralarda kullanılmamalıdır.

### Uyarılar

Medical Adhesive Remover bebeklerde yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Medical Adhesive Remover sağlam ciltte kullanıma yöneliktir.

Medical Adhesive Remover kullanımıyla ilgili inatçı cilt tahrişi meydana gelirse lütfen bir sağlık çalışanı ile iletişim kurun.

Cildin nazik veya hassas alanlarında (yaralarda, gözlerde, mukozada) kullanımından kaçının. Doğrudan solumaktan kaçının. Son derece yanıcı aerosol.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan, kıvılcımdan, açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzakta tutun. Sigara içilmez. Açık bir aleve veya başka tutuşma kaynağına püskürtmeyin.

Basınç altında gaz içerir; ısıtılırsa patlayabilir. Kullanımı bittikten sonra bile delmeyin veya yakmayın. Güneş ışığından koruyun. 50C/122F'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## Ek Bilgiler

Ürünün kullanımıyla ilgili ciddi yaralanma (kaza) olması halinde lütfen yerel distribütörünüzle veya üreticiyle ve ayrıca yerel yetkili makamınızla iletişim kurun. Daha fazla bilgi almak veya teknik yardım için lütfen bizimle [www.furine.com](http://www.furine.com) aracılığıyla iletişim kurun. Furine ApS, bu ürünün Furine ApS mevcut önerilerini ihlal edecek şekilde kullanılması halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan veya kayıptan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

## İçindekiler

Siloksan, püskürtücü, eser miktarda parfüm içerebilir.

## Kullanım talimatları

Medical Adhesive Remover'ı yapışkan ürünün kenarının çevresine püskürtün ve birkaç saniye bekleyin. Çıkarmayı kolaylaştırmak için ek Medical Adhesive Remover kullanarak yapışkan ürünü ciltten nazıkçe çekerek çıkarın. Gerekliyse sonrasında cildi mendille silin.

Ürün birkaç saniyede kurur ve sonraki yapışkan ürünlerin yapışkanlığını etkilemez.

Aerosolü yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Furine, İngiltere ve AB'de tescilli bir ticari markadır

 Yasal Üreticisi  
Furine ApS  
Industrivaenget 1  
3320 Skaevinge  
Danimarka

 30°C  
5°C Saklama koşulları

 Tıbbi Cihaz

  Dikkat – Kullanım  
Talimatlarına başvurun

 Steril değildir

 Son kullanma tarihi  
Birincil ambalaja bakın

 Seri kodu  
Birincil ambalaja bakın

 Güneş ışığından uzak tutun

 aerosol ürün için AB gerekliliklerini karşılar

 CE işaretli cihaz

Sürüm: IFUxA01-05TR  
2024-03

 Referans kodu  
A01TR10

 Son derece yanıcı