

İçindekiler:

- 1 Furine® / Furine® plus
- 1 Furine® Collect
- 2 Medical Skin Wipes
- 1 Securin™ Skin Barrier

Ürün tanımı ve kullanım alanı

Furine® perianal cilde uygulanan, invaziv olmayan bir dışkı yönetim sistemidir.

Furine'in kullanım amacı, dışkı kaçırma yaşayan hastalarda dışkı sıvı maddesinin yönlendirilmesi ve böylelikle hastanın cildinin korunması ve yatağın temiz tutulmasının sağlanmasıdır. Sıvı dışkı maddesi Furine aracılığıyla anal açıklıktan Furine® Collect içerisine sızar. Furine değiştirilmeden önce 7 güne kadar kullanılabilir. Medical Skin Wipe, daha güçlü yapışma elde etmek için Furine uygulanmadan önce cildi hazırlamak için kullanılır. Securin™ Skin Barrier cilt üzerinde bir koruyucu bariyer oluşturmak için uygulanır ve Furine'in cilde yapışmasını güçlendirir.

Endikasyonları

Cihazın kullanım amacı, sıvı dışkı kaçırma yaşayan hastalarda Bristol Stool Scale (BSS) üzerinde 6 veya 7 tipi dışkı toplanmasıdır.

Furine'in bir sağlık kurumunda eğitimli sağlık çalışanları tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

Kontrendikasyonlar

Furine aşağıdakilerin bulunduğu kişilerde kullanılamaz:

- katı dışkı (BSS 1-5),
- büyük harici hemoroidler,
- rektal prolapsus,
- perianal yaralar,
- içerik maddelerine bilinen alerji,
- 30 kg'nin altında vücut ağırlığı.

Uyarılar

Tekrar kullanmayın. Furine veya parçalarının tekrar kullanılması enfeksiyona veya çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Perianal ciltte tahriş veya enfeksiyon varsa Furine kullanımını kesin.

Furine hemoroidleri olan kişilerde yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Furine çocuklarda yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Furine'i sterilize etmeyin.

Hastada yüksek düzeyde terleme varsa veya hasta obezse Furine yapışkanlık yeteneğini kaybedebilir.

Furine ApS, bu ürünün Furine ApS'nin mevcut önerilerini ihlal edecek şekilde kullanılması halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan veya kayıptan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

İçeriği

Medical Skin Wipes ve Securin Skin Barrier siloksan içerir.

Ek bilgiler

MRG güvenlik bilgileri: bilinmiyor. Bu cihazın varlığı bir görüntü artefaktına neden olabilir.

Ürünü kullanmanızla ilgili ciddi yaralanma (kaza) olması halinde lütfen yerel distribütörünüzle veya üreticiyle ve ayrıca bölgenizdeki yetkili makamla iletişim kurun.

Daha fazla bilgi almak veya teknik yardım için lütfen bizimle www.furine.com aracılığıyla iletişim kurun.

Furine, İngiltere ve AB'de tescilli bir ticari markadır.



Kullanım
Talimatlarına
başvurun



Saklama koşulları



Steril değildir



Tek kullanımlık



Son kullanma tarih
Birincil ambalaja
bakın



Seri kodu
Birincil
ambalaja bakın



CE işaretli cihaz



Lateks içermez



Tıbbi Cihaz



Referans kodu

B05TR22 /
B06TR22

Sürüm: IFUx05-05TR
2024-03




Yasal Üreticisi
Furine ApS
Industrivaenget 1
3320 Skaevinge
Danimarka


Uygulama Kılavuzu




1 Perianal cildi temizleyin ve kurulayın.
Cildin kuru ve zarar görmemiş olduğundan emin olun.
Cildin iyice yapışmasını sağlamak için fazla yağı **Medical Skin Wipe** ile temizleyerek cildi hazırlayın.
Başka herhangi bir cilt bariyer filmi ürünü **kullanmayın**.

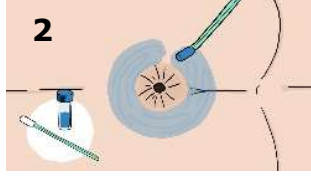


2 Eküvyon çubuğunu kullanarak Securin Skin Barrier'i makat çevresindeki cilde uygulayın. Securin Skin Barrier üzerine yerleştirilecek Furine'in cilt yapışkan yüzeyiyle aynı genişlikte (yaklaşık 3 cm) uygulanmalıdır.
NOT: Furine'in cilde yapışan tüm yüzeyinin Securin Skin Barrier'a yapışması gerekir.

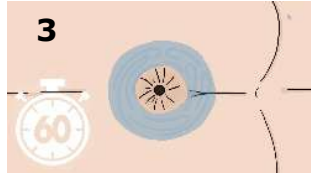

3 Kalçaları ayrılmış halde tutarken 60-90 saniye boyunca **(kuruyana kadar)** Securin Skin Barrier'i kurumaya bırakın.
Önemli: Furine uygulanmadan önce Securin Skin Barrier'in tamamen kuruması önemlidir. Islak veya kısmen ıslaksa sızıntı riski daha yüksektir.

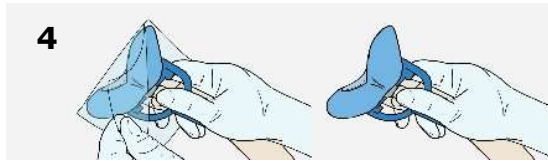


4 Cilde yapışan yüzeydeki şeritleri tutarak Furine'i aplikatör üstünde güvenli şekilde sabitlenmiş halde tutun ve cilde yapışan yüzeyden dokunulmaması gereken folyoyu çıkarın.

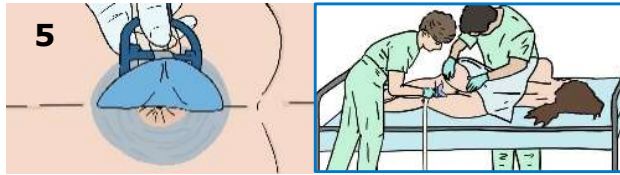

5 Cilde yapışan yüzey önceden uygulanan Securin Skin Barrier'a yapışabilecek şekilde perianal ciltte Furine'i konumlandırmak için aplikatörü kullanın.
İlk önce anal yarık ve perineum ile temas etmesi için Furine'i perianal cilde sıkıca bastırın.





6 Cilde yapışan yüzeyin kalanını iki parmağınızı kullanarak perianal cilde bastırın.

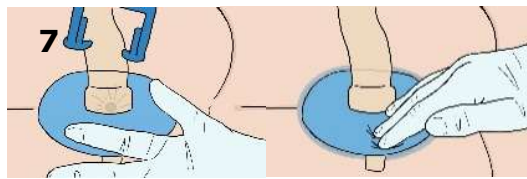

7 Aynı zamanda diğer elinizle Furine'i yerinde tutarken aplikatörü perianal ciltten uzağa çekerek dikkatlice çıkarın.

8 Cilde yapışan yüzeyin kalanını iki parmağınızı kullanarak perianal cilde **tekrar** bastırın.

Furine uygulamasından sonra fazla Securin Skin Barrier temin edilen ikinci Medical Skin Wipe kullanılarak temizlenebilir.

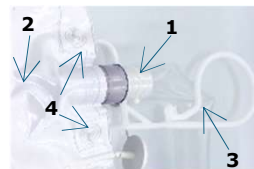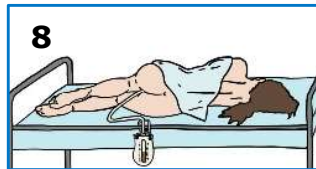

9 Furine'in konektörünü (1) Furine Collect'e (2) bağlayın ve emniyet kancalarını (4) Furine Collect'teki deliklere yerleştirin. Askıyı (3) yatağın iki tarafına konumlandırın.

Cilde yapışan yüzeyi sızıntılara karşı düzenli şekilde kontrol edin ve gerekliyse Securin Skin Barrier ile onarın. Furine Collect günlük olarak veya gerektiğinde daha sık değiştirilmelidir.



9 Kullanımı bittikten sonra Medical Skin Wipes veya Medical Adhesive Remover kullanarak Furine'i çıkarın. 2-3 adet Medical Skin Wipes ile nazıkçe silerek veya Medical Adhesive Remover püskürterek Furine şeritlerini dikkatlice çekin. Ciltten tüm Securin Skin Barrier kalıntısını dikkatlice temizlediğinizden emin olun. Kurumuş mendilleri **kullanmayın**. Siloksan bazlı olmayan mendilleri **kullanmayın**. Kullanıldıktan sonra Furine'i prosedürlere göre klinik atıklarla bertaraf edin.