

Ürün Tanımı ve kullanım alanı

Furine® Collect, Furine® & Furine® plus için bir aksesuardır.

Furine Collect'in kullanım amacı, Furine veya Furine plus kullanarak hastalardan sıvı dışkı maddesinin toplanmasıdır.

Furine Collect 1000 ml sıvı toplayabilir.

Furine Collect havanın çıkmasına izin vermek ve kokuyu azaltmak için bir kömür filtresi ve ayrıca, Furine Collect'ten dışkı maddesi sızıntısını önlemek için hava çıkış hortumunda bir jel bloker içerir. Furine Collect günlük olarak değiştirilmeli ve ardından atılmalıdır.

Cihazın bir sağlık kurumunda eğitimli sağlık çalışanları tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

Endikasyonları

Furine Collect, Furine veya Furine plus'tan dışkı sıvının toplanması için endikedir.

Uyarılar

Tekrar kullanmayın. Furine Collect'in tekrar kullanılması enfeksiyona veya çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Furine Collect'ten çıkan dışkı kokusu gelirse torba değiştirilmelidir.

Furine Collect değiştirildikten sonra koku devam ederse, Furine veya Furine plus değiştirilmelidir.

Sıvı içeren Furine Collect, hava çıkış hortumunda dışkı maddesinden kaçınılması için dik bir konumda tutulmalıdır. Dışkı maddesi hava çıkış hortumuna girerse hava çıkış hortumundaki jel bloker çıkışı engelleyecektir, böylece hava artık dışarı çıkamaz ve Furine Collect'in değiştirilmesi gereklidir.

Furine ApS, bu ürünün Furine ApS'nin mevcut önerilerini ihlal edecek şekilde kullanılması halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan veya kayıptan hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ek bilgiler




MRG güvenlik bilgileri: bilinmiyor. Bu cihazın varlığı bir görüntü artefaktına neden olabilir.

Ürünü kullanmanızla ilgili ciddi yaralanma (kaza) olması halinde lütfen yerel distribütörünüzle veya üreticiyle ve ayrıca bölgenizdeki yetkili makamla iletişim kurun.






Daha fazla bilgi almak veya teknik yardım için lütfen bizimle www.furine.com aracılığıyla iletişim kurun.

Kullanım Talimatları

1. Furine Collect ağzını konnektör ağzına iterek Furine Collect'i Furine veya Furine plus konnektörüne takın.
2. Konnektör üzerindeki iki emniyet kancasını Furine Collect'teki iki deliğe yerleştirin, böylece Furine Collect yanlışlıkla yere düşmeyecektir.
3. Değiştirilmeden önce Furine Collect'in maksimum 24 saat takılı kalmasına izin verin veya 1000 ml sıvı içerdiğinde Furine Collect'i değiştirin.
4. Furine Collect, Furine veya Furine plus konnektöründen Furine Collect çıkarılarak ve ardından Furine Collect kapağı Furine Collect ağzına sıkıca yerleştirilerek değiştirilir.
5. Furine Collect ardından atılabilir. Furine Collect'i yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

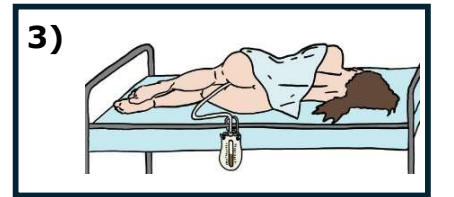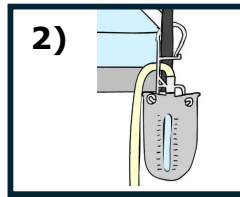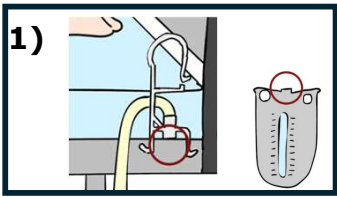

Furine, İngiltere ve AB'de tescilli bir ticari markadır.

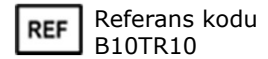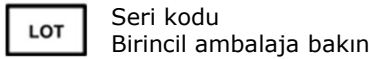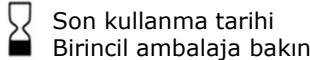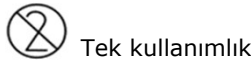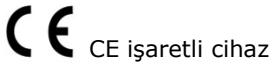

Sürüm: IFUxB10-05TR
2024-03