

Laboratorio Bueso Arias MANUAL TOMA DE MUESTRA

Requerimientos para la Toma de Muestra Analisis de HE, COA, QC,IN, BAC, URO/PARA Codigo: MOPA06-A1 /Revision: 20

HEMATOLOGIA:

CODIGO	NOMBRE DE PRUEBA	SINONIMO	MUESTRA PRIMARIA	MUESTRA ALTERNA	VOLUMEN MINIMO	REQUERIMIENTO	DIAS QUE SE REALIZA	TIEMPO DE ENTREGA	TEMPERATURA	METODOLOGIA
118	DREPANOCITOS	CELULAS FALCIFORMES, METABISULFITO DE SODIO	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	LUNES A JUEVES, Y VIERNES HASTA MEDIODIA	2 DIAS HABILES	18-24 °C	Coloracion de Metabisulfito de Sodio
1195	FRAGILIDAD OSMOTICA ERITROCITICA	Fragilidad eritrocitaria	SANGRE TOTAL HEPARINA	N/A	3 ml.	La muestra es estable durante 2 horas a temperatura ambiente y hasta 6 horas de 2-8 °C. Criterio de rechazo: muestras con hemolisis y muestras con mas de 6 horas desde la toma.	LUNES A VIERNES	3 DIAS HABILES	Si la muestra tiene menos de 2 horas de toma enviar de : 18-24 «C, Si tiene mas de 2 horas de toma enviar refrigerada de 2-8 °C	Dacie
117	HEMATOZOARIO	Extendido Fino, Malaria o Plasmodium	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Coloracion de Panoptico + Microoscopia
120	RECUENTO DE EOSINOFILOS	Eosinofilos	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO muestras recién tomada	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	MAPSS Optico de diferentes Angulos + Citometria de Flujo
103	RETICULOCITOS	RETIS	SANGRE TOTAL (K2EDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO. SE NECESITA DATO DE HEMOGRAMA	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Coloracion de Azul de Bromo Crecilo + Microoscopia
105	VELOCIDAD ERITROSEDIMENTACION	VES	SANGRE TOTAL (KZEDTA o k3 EDTA)	N/A	4.5 ml.	NO REQUIERE AYUNO muestras recién tomada	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Westergren
104	TIPO DE SANGRE-RH	ABO-Rh	SANGRE TOTAL (KZEDTA o k3 EDTA)	N/A	1 ml.	NO REQUIERE AYUNO	DIARIO	1 DIA HABIL	18-24 °C	Directa En lamina y Tubo
1683	HEMOGRAMA COMPLETO	Leucocitos, Eritrocitos, Hemoglobina, Plaquetas, Reticulocitos	SANGRE TOTAL (KZEDTA o k3 EDTA)	N/A	3 ml	No requiere ayuno. Muestra recien tomada	Diario	1 DIA HABIL	18-24 °C	Principio Coulter, Hemoglobinometria, Tecnologia VCS(Analisis de Volumen, Dispersion de luz y Conductividad)

Fecha de Elaboracion: 2014-01-09 Fecha de Modificacion: 2025-05-29



Laboratorio Bueso Arias MANUAL TOMA DE MUESTRA

Requerimientos para la Toma de Muestra Analisis de HE, COA, QC,IN, BAC, URO/PARA

Codigo: MOPA06-A1 /Revision: 20
Strylendo con calidat.

CODIGO	NOMBRE DE PRUEBA	SINONIMO	MUESTRA PRIMARIA	MUESTRA ALTERNA	VOLUMEN MINIMO	REQUERIMIENTO	DIAS QUE SE REALIZA	TIEMPO DE ENTREGA	TEMPERATURA	METODOLOGIA
101		Leucocitos, Eritrocitos, Hemoglobina, Plaquetas	SANGRE TOTAL (KZEDTA o k3 EDTA)	N/A	3 ml	No requiere ayuno. Muestra recien tomada	Diario	1 Dia habil	18-24 °C	Principio Coulter, Hemoglobinometria, Tecnologia VCS(Analisis de Volumen, Dispersion de luz y Conductividad)

Fecha de Elaboracion: 2014-01-09 Fecha de Modificacion: 2025-05-29