

Fleximed

Omega Stol Bruker manual

Hvorfor er det behov for denne type stol?

Omega ble opprinnelig utviklet for personer med Huntingtons sykdom og andre nevrologiske tilstander. Over tid har Omega blitt en anerkjent og verdsett stol for mange omsorgs grupper.

Mulighetene til en sittende person for å utføre aktiviteter avhenger av deres evne til å ivareta den riktige sittestilling. All aktivitet er holdnings avhengig. Dersom en person ikke kan bevege seg, eller har problemer med å justere overroppen, kan det være nødvendig å benytte sitte systemer for å avhjelpe behovet.

Komfort og sikkerhet underbygger Omega stolen. Det er en robust og slitesterk stol som tåler krevende og alvorlige bevegelser som også gir en trygg og avslappet sittestilling.

Omega gir en god sittestilling for ulike aktiviteter og spising. Den unike buede formen på rygg og sete gir mer stabilitet for brukeren. Formen posisjonerer brukeren i midtlinjen noe som gir økt komfort.

Hvem kan bruke Omega stolen?

Omega er for brukere med Huntingtons sykdom og andre nevrologiske tilstander samt generelle pleiepasienter. Omega kan brukes innenfor en rekke ulike miljøer som i hjemmet, sykehus og sykehjem.



Introduksjon av Omega stolen

Hva er en Omega ?

Formålet med Omega er å gi en robust og slitesterk stol som tåler krevende og alvorlige bevegelser. Den skal gi brukeren en sikker og komfortabel sittestilling med god

postural støtte. Stolen har gode trykkavlastende egenskaper for de som sitter i lengre perioder.

Omega Produktinformasjon

Trykkavlastende materiale til sete modul

- Intelli-Gel
- Transflo Gel
- Reflexion™ skumgummi

Tilbehør

- Universal hodestøtte
- Omega hodestøtte
- Sliding fotbrett
- Vaskbare løse trekk
- Beskyttelse hodedel
- Hoftebelte
- Bekkenbelte

Alternativer

- Tre ulike setebredder
- (380mm / 430mm / 510mm)

- Tre forskjellige sete dybder
- (430mm / 470 mm / 500 mm)

Vektgrense er 150kg

Retningslinjer for behov/bruk av Omega stolen

1. Søk råd og innspill fra en kvalifisert terapeut / sykepleier / eller distributør ved søknad på stolen.
2. Det anbefales at alle de ansatte som jobber med brukeren bør trenes i bruken av stolen.
Dette for å sikre at den blir justert i en sikker og riktig posisjon.
3. Brukere av Omega stolen skal kontrolleres jevnlig for å sikre at den beste posisjonen opprettholdes i stolen.

Brukerveiledning

Hensikten med bruksanvisningen er å gi en oversikt på hvordan man kan utnytte, justere og vedlikeholde Omega stolen på en best mulig måte.

Disse instruksjonene bør leses av alle som er involvert i brukeren av stolen.

Rygg høyden må justeres i forhold til buker og ryggvinkel må justeres for å sikre trygg og komfortabel bruk.

Spørsmål

Hvis du opplever problemer eller har noen spørsmål angående justering av Omega stolen eller har noen spørsmål angående bruken eller driften ta kontakt med distributør. Vi hjelper deg gjerne.

Generell bruk av Omega

Det anbefales at stolen er justert for å imøtekomme hver brukers spesifikke krav til rygg høyde og rygg / setevinkel i hvile.

Justering av rygg / setevinkel kan enkelt gjøres med bruker i stolen. Justering av rygg høyde må gjøres når bruker ikke sitter i stolen.

Høydejustering rygg

Omega har to rygg høydeinnstillinger, høy stilling på 800mm og lav innstilling på 740mm.

Sørg for at bruker ikke sitter i stolen ved justering av rygg høyde.

Festeskruer finnes på baksiden av ryggen på stolen. De to øverste skruene skal skrues helt ut, mens de to nederste skruene skal løsnes slik at ryggen kan føres opp eller ned. Ikke løsne ryggen fra rammen.

Flytt rygg modulen til ønsket høyde og forsikre deg at alle skruene er godt festet.

Sjekk alltid at rygg modulen ikke er løs før bruker plasseres i stolen.



Justering av rygg og setevinkel

Rygg og setevinkel endres ved hjelp av å utløse en gasspumpe. Denne mekanismen er plassert på høyre side av kjørehåndtaket på baksiden av stolen.



Rygg og setevinkel er sammenkoblet. Setevinkel øker når ryggen justeres bakover. Dette optimaliserer sittestillingen.

For å justere rygg og setevinkel må spaken på kjørehåndtaket presses inn for så å presse kjørehåndtaket til ønsket posisjon er oppnådd.



For å returnere tilbake til en mer oppreist stilling, klem inn spaken mot kjørehåndtaket og før ryggen til ønsket posisjon.
Husk alltid å kontrollere posisjoneringen av brukeren regelmessig for å sikre at posisjon opprettholdes.

Strekking av kabelen

Etter utstrakt bruk spak og gasspumpe for justering av rygg kan kabelen bli strukket og mindre effektiv.

For å stramme kabelen må den lille skruen på toppen av spaken løsnes. Bruk en tang og trekk kabelen litt gjennom spaken. Stram til skruen.




Sete modul

Nødvendig verktøy: Stjerne skrutrekker

Sete modul til Omega stolen er festet på en sikker måte. Ved behov for å bytte sete modul eller rengjøring kan den løsnes.

For å fjerne sete modulen, snu stolen over på siden slik at undersiden av stolen er synlig. Dette må gjøres med forsiktighet for ikke å skade deg selv eller stolen. Det anbefales at to personer utfører oppgaven.

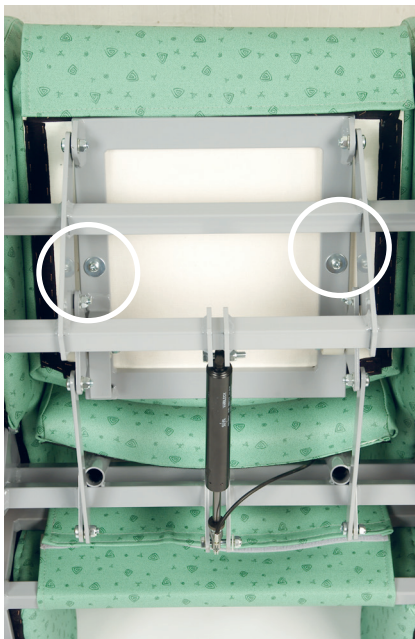

Når undersiden av stolen er synlig, lokaliser og løsne to stjerneskruer. Skru disse helt ut for så å fjerne sete.

For å feste sete modul, plasser hullene i sete over hullene i rammen. Stram skruene. Sjekk alltid at skruene er skikkelig festet før brukeren blir plassert i stolen.

Hjul

Omega stolen er utstyrt med 100mm hjul på både stol og benstøtte/puff. Det er brems på de 2 bakerste hjulene på stolen og de 2 fremste hjulene på benstøtte/puff.

For å aktivere bremsene, trykk ned på forkanten av bryter på hvert hjul. Bremsene skal alltid brukes ved forflytning av brukere.



For å løsne bremsene, trykk ned på øvre kant av bryter og før den tilbake.



Kontroller alltid at hjulene ikke er låst før du flytter stolen.

Puffen/benstøtten


Benstøtten er trekonstruksjon som er trukket med skumgummi. Hjulene er nøyaktig på linje. Bakhjulene på benstøtten er satt på for å gi økt mobilitet og manøvrerbarhet.



Benstøtten er festet/låst til stolen med sterke gummi spenner. Dette sikrer at benstøtten opprettholder posisjonen i forhold til stolen.



For å feste benstøtten trekkes spennen på benstøtten over og på bakside av feste på stolen. Press den så på plass i sporet. Spennen skal skyves forover til den smekker igjen mot stolen. Dette gir en sikker fiksering av benstøtten til stolen.

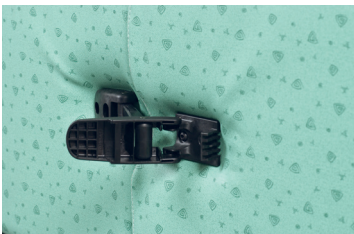

For å løsne spennen løftes den ut slik at den spretter opp. Dette kan gjøres på en side eller begge sider av stolen.



Redusert spenning i benstøtten

Etter en periode med bruk kan benstøtten bli slakk mot stolen hvor skumgummi er blitt komprimert. Benstøtten kan da virke løs.

Skumgummi vil bli komprimert over tid. Dette fører til at benstøtte kan virke løs. Ved å flytte gummi spenner vil fikseringen bli optimal. Disse flyttes til det andre settet med skrue hull.

Pass på at festepunkter er skikkelig festet.

Dette bør utføres på begge sider av stolen for lik spenning og stabilitet.



Universal hodestøtte

Den vektete universale hodestøtten kan festes til Omega stolen ved hjelp av borrelås.

Hodestøtten er tilgjengelig i stolens møbelstoff, Dartex stoff eller det unike Spacer stoffet.

Spacer stoff

Det er integrert antimicrobial og anti støv middel i hodestøtten under produksjonen. Tilsetningene gir beskyttelse mot sopp, bakterier, midd og forebygger lukt. Dette er et meget hygienisk produkt som også beskytter mot MRSA.

Fordeler med Spacer stoff:

- Optimal temperatur
- Enestående luft permeabilitet
- God drenering av fuktighet
- Passiv ventilasjon
- Kan vaskes i maskin
- Trykkavlastende skumkvaliteter
- 100% resirkulerbar

Beskytter av hodedel (tilbehør)

Dette er et beskyttende trekk som føres over toppen av stolryggen for å forebygge slitasje.

Løse trekk (tilbehør)

Omega stolen kan utstyres med vaskbare avtakbare trekk for rygg, sete, armlener og benstøt-te/puff.

Under produksjon blir stolen og benstøtten utstyrt med borrelås på undersiden. Dette gjør at løse trekk enkelt kan ettermonteres ved behov.

Alle løse trekk trekkes enkelt over sine respektive moduler og festes med borrelås på undersiden.

Hoftebelte (tilbehør)

Hoftebeltet bidrar til å optimalisere posisjonering av brukeren. Hoftebeltet kan monteres ved produksjon eller etter bestilles.

Når brukeren er plassert i stolen festes beltet med spennen. Hoftebelte strammes enkelt ved å trekke i plastringene.

MERK: Les brukerveiledningen for hoftebeltet for ytterligere informasjon.

Sliding Fotbrett (tilbehør)

Sliding fotbrett er designet for å støtte føttene når stolen er i bruk uten benstøtte/puff.

For bruk, trekk brettet helt frem.

Skyv brettet helt tilbake før brukeren føres inn eller ut av stolen.

Ikke stå på fotbrettet.

Bruk alltid fotbrettet under transport uten benstøtte/puff.



Renhold og vedlikehold

Se retningslinjer som følger stolen med en etikett som er festet. Tørk av rammen med såpevann og klut. Sjekk hjulene regelmessig for oppbygging av støv og partikler. Rengjøring med svamper er ikke anbefalt .

Spørsmål

Skulle du ha noen spørsmål enten før eller etter kjøpet av stolen kontakt distributør.

Hvis spørsmål dreier seg om en bestemt stol, vennligst ha ordnummer tilgjengelig. Dette kan være plassert på bunnen av hver stol og hjelper oss med å identifisere dine opplysninger og kan svare på din forespørsel effektivt.

Risiko, forholdsregler og advarsler

Brukeren kan være i fare hvis Omega stolen ikke er spesifisert og tilpasset deres individuelle behov.

Ikke la benstøtten/puffen brukes som et sete. Ikke skyv stolen med benstøtten. Dette kan føre til skade på stolen eller personen som sitter på benstøtten/puffen.

Ikke prøv å flytte på stolen uten først å sikre at alle hjul er låst opp.

Ikke sitt på armlener. Dette kan føre til skade på stolen og påvirke stabiliteten.

Brukere bør regelmessig kontrolleres og overvåkes i stolen. Dette for å unngå at de glir ut av stolen eller kommer i en uheldig posisjon.

Brukere og pleiere bør være forsiktig så de ikke skader seg på festene til benstøtten/puffen når den festes eller løses fra stolen. Festene er imidlertid laget av gummi og bøyes ved støt.

Brukere og pleiere bør være forsiktig så ikke hender klemmes mellom rygg og sete. Vær også forsiktig med hender mellom benstøtte og stol ved festing eller når den løses fra stolen.

Benyttes tilbehør som bekkenbelte eller hoftebelte er det viktig at bruker kontrolleres regelmessig for å sikre posisjonering i stolen.

Sertifisering:

BHTA
British Healthcare Trades Association

TSI
Approved Code
tradingstandards.gov.uk

ISO 9001
ISO 14001

CE registrated medical devices



Produsent:



www.kirton-healthcare.co.uk

Fleximed

Storgata 7

3300 Hokksund

Telefoner: Steffan +47 91 54 03 99, Arne +47 93 04 57 11

www.fleximed.no