

Componentes do Kit

- Caixa de isopor;
- Copo coletor de urina;
- Bolsa de gelo;
- Saco com fechamento hermético;
- Folha absorvente;
- Formulário.

Antes da coleta

- Coloque a bolsa de gelo no freezer, para que esteja pronta para ser enviada com sua amostra;
- PREENCHA TODOS OS DADOS DO FORMULÁRIO QUE ACOMPANHA O EXAME! O não preenchimento correto pode acarretar no atraso do envio da amostra;
- Evite consumir por 48 horas antes da coleta: maçãs, suco de maçã e produtos derivados, uvas, suco de uva e produtos derivados (incluindo passas), peras, suco de pera e produtos derivados, cranberries, suco de cranberry e produtos derivados, cogumelos Reishi ou Echinace e suplementos de arabinogalactana ou ribose;
- Evite consumir por 3 dias antes da coleta: glutatona, carvão ativado e argila bentonita ou aglutinantes semelhantes;
- Se estiver tomando micofenolato de mofetil (CellCept/Mycofortic), avise nosso laboratório;
- Evite a coleta durante infecção do trato urinário; pacientes mulheres não devem estar menstruadas para coletar o exame;
- Evite a ingestão excessiva de líquidos na noite anterior à coleta;
- Suplementos e medicações podem impactar os resultados. Por favor informe seu médico prescritor à respeito dos medicamentos que você está tomando. Não interrompa nenhum medicamento ou suplemento sem primeiro consultar seu médico;
- Espere 48 horas após completar um ciclo de antibióticos antes da coleta;
- Caso esteja utilizando algum medicamento com azul de metileno, aguardar o fim do tratamento e a normalização da cor da urina antes de coletar a amostra. A urina não poderá estar azul ou esverdeada, pois não será analisada.

Coleta da amostra

- Colete a primeira urina matinal no copo de coleta fornecido. NÃO coma ou beba antes de coletar sua amostra. Colete pelo menos 30 mL de urina. Despeje qualquer conteúdo acima da linha indicadora de 50 mL para evitar vazamentos uma vez congelado.
- Coloque a tampa no copo coletor e feche bem.
- Mantenha o material biológico congelado;
- Para o envio, coloque o tubo com a amostra e a bolsa de gelo embalagem com fechamento hermético, e depois dentro da caixa de isopor. Anexe o formulário preenchido na caixa.
- Realize a coleta preferencialmente às segundas ou terças-feiras. Caso esteja fora da região da grande São Paulo, realize a coleta preferencialmente no domingo ou segunda-feira e faça o envio para nossa área técnica via Sedex o mais rápido possível. Endereço para envio via Sedex:

OrigoLab - Área técnica - CNPJ: 22.413.748/0001-59

Avenida Santo Amaro, nº 3432 - 9º andar

Brooklin Paulista, São Paulo/SP - CEP 04556-300

- Em caso de dúvidas, contatar o atendimento pelo whatsapp: 11 2737-0491.