

Itens necessários para coleta

- 1 – Caixa de kit
- 1 – Formulário de solicitação de teste
- 1 – Frasco para coleta de sangue (tampa vermelha)
- 3 – Lancetas (roxas)
- 3 – Lenços umedecidos com álcool

COLETA DE SANGUE POR PICADA NO DEDO


- 3 – Bandagens
- 1 – Suporte para tubo de espuma
- 1 – Bolsa para espécimes com fecho zip e almofada absorvente

Caso esteja faltando algum dos componentes necessários ou tenha dúvidas sobre a coleta, entre em contato com nosso atendimento através do Whatsapp no número 11 2737-0491.

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE SANGUE TOTAL POR PICADA NO DEDO


LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR E SIGA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO – COLETA E ENVIO INADEQUADOS PODEM CAUSAR REJEIÇÃO DA AMOSTRA OU RESULTADOS INVÁLIDOS. *Dicas para otimizar a coleta:*

1. Hidrate-se: beba água 30 minutos antes de tentar coletar sangue.
2. Tenha mãos quentes: lave as mãos em água morna (não quente) enquanto esfrega as pontas dos dedos.
3. Aumente o fluxo sanguíneo: gire os braços várias vezes para aumentar a circulação nos dedos.
4. Selecione o(s) dedo(s) médio(s) ou anelar(es) no lado oposto ao polegar: evite calos. Não colete da ponta do dedo.
5. Massageie a mão: comece no centro da mão e mova suavemente e firmemente para baixo até o local da punção.
6. Colete gotas pendentes em vez de retirar o sangue com o tubo: isso produzirá uma amostra mais limpa e evitará espalhar sangue ao longo do dedo.

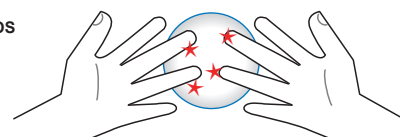


*Selecione o dedo médio ou anelar em local longe dos polegares para obter melhores resultados.

1 OBS.: Coloque todos os materiais de coleta em uma superfície plana para facilitar o uso.

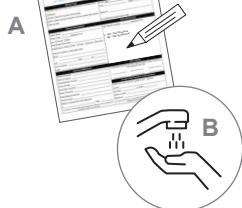

A) Preencha todas as seções do formulário, incluindo nome do paciente, data de nascimento e data da coleta da amostra.


B) Lave bem as mãos, prestando atenção especial às pontas dos dedos, em água morna.

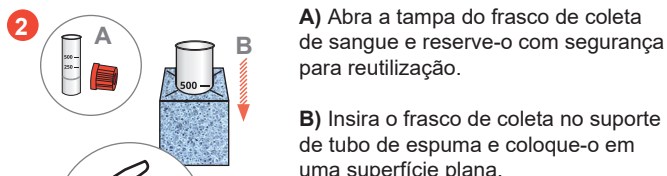

A) Abra a tampa do frasco de coleta de sangue e reserve-o com segurança para reutilização.


B) Insira o frasco de coleta no suporte de tubo de espuma e coloque-o em uma superfície plana.

C) Imediatamente antes da coleta, limpe a ponta de um dedo com um lenço umedecido com álcool e deixe secar completamente.

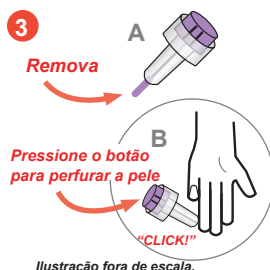

A) Fazendo um movimento de torção, remova e descarte a tampa de uma lanceta.

B) Enquanto segura o dedo abaixo do coração, pressione a lanceta firmemente contra o dedo limpo. Pressione o botão roxo na lanceta uma vez até ouvir um clique audível. Remova a lanceta do dedo.

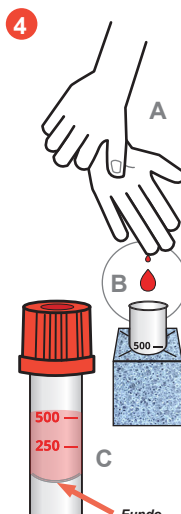

A) Com o dedo para baixo sobre o tubo, massageie suavemente a partir da palma até o local da punção para manter o fluxo sanguíneo.

B) Colete gotas de sangue no frasco. Certifique-se de que o sangue esteja caindo para o fundo do frasco e não se acumulando nas laterais.

C) Um mínimo de **250 ul de sangue** precisa ser coletado para o teste **IgG**.

Um mínimo de **500 ul de sangue** precisa ser coletado para o teste **IgE** ou teste **IgE/IgG combinado**.

Após a coleta, pressione e gire a tampa na parte superior do frasco para prendê-lo para envio. **NÃO REFRIGERE a amostra coletada!** O bloco de espuma pode ser descartado antes do envio.

‡ **IMPORTANTE:** Se a quantidade de amostra necessária não puder ser coletada, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter instruções alternativas.

Pode ser necessária a coleta de diferentes dedos para coletar o volume necessário no frasco de coleta único. Use uma nova lanceta para cada punção e repita a partir da etapa 2C. Aplique um curativo adesivo estéril em cada punção.



A) Coloque o frasco de coleta fechado no saco de amostra. Coloque o formulário preenchido no suporte de documentos do saco de amostra.

B) Coloque o saco de amostra (incluindo a amostra e o documento) dentro da caixa do kit.

Não Congele ou Resfrie a Amostra Coletada. Envie a amostra no mesmo dia da coleta, de segunda a quinta-feira somente.

INSTRUÇÕES DE ENVIO:

Entre em contato com nosso atendimento através do Whatsapp no número 11 2737-0491 para informações a respeito de envio ou retirada de amostras.