

94374 Kompress 10x10 cm

Steril Brännskadekompress 10x10cm med binda

Instruktionsfolder med 26 språk på produkten.

SE/GB/NO/DK/FI/DE/FR/IT/NL/IS/TR/GR/PT/ES/CZ/PL/EE/LV/LT/RU/SK/SL/UA/AR/HU/KO

- For Burns Brännskadekompress är en produkt som ger snabb avkylning och lindring när det kommer till brännskador, solsveda och skrubbsår
- Gelen bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt svalka skadeområdet och transportera bort värmen genom konvektion.
- Risken för blåsbildning minskar väsentligt
- Produkterna är enkla att använda och fungerar bra vid transport för fortsatt vård
- Produkterna passar särskilt bra där du inte har tillgång till vatten



Bruksanvisning:

Öppna förpackningen och ta ur kompressen. Lägg på kompressen på skadan och håll över resterande gel från påsen.

Fixera löst med medföljande binda. Bäst effekt uppnås under de första 3 timmarna.

Varning:

- Att täcka en stor kroppsyta kan orsaka hypotermi.
- För engångsbruk - Återanvändning kan orsaka infektion.
- Använd inte om förpackningen är skadad eller om förbandet verkar uttorkat.

Kemiska brännskador: Vid kemiska brännskador måste såret sköljas noggrant och neutraliseras innan gelen används.

Innehåll:

Skumkompress - 100% Polypropylene Medical Grade Foam

50g gel - Purified water, Melaleuca Oil (<1%), Emulsifiers and preservatives

Förpackningsvarianter i samma storlek

94373 Kompress (bulk)

94393 Display med 10 kompresser



TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI		URSPRUNGSLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	AKLA	BRÄNNSKADEPRODUKTER		SVERIGE	30059099	93/42/EEC
HÅLLBARHETSTID				MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT
5 år från tillverkningsdatum				Class IIb Rule 4 Sterile	ISO 13485	ISO 14001
NSN		NIIN		GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES
					33141119-7	
ECLASS		UNSPSC				
34210000		42311513				
LOGISTIK		ANTAL	MÅTT	VIKT		EAN / GS1
KFP		1 st	80x110x25mm	0,045 KG		7311410943744
KFP / DFP						
KFP / TRP		10 st	260x180x80mm			7311410243745
KFP / Pall		128 st	1200x800x790mm			

