

91146 Brännskadelåda - large

Stor välfylld låda som innehåller AKLAs brännskadeprodukter i olika storlekar. Lådan är lätt att ta med sig till den skadade.

- For Burns Brännskadekompress är en produkt som ger snabb avkylning och lindring när det kommer till brännskador, solsveda och skrubbsår
- Gelen bromsar effekterna av en brännkada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen genom konvektion. Risken för blåsbildning minskar väsentligt
- Produkterna är enkla att använda och fungerar bra vid transport för fortsatt vård
- Produkterna passar särskilt bra där du inte har tillgång till vatten.

Bruksanvisning:

Öppna förpackningen och ta ur kompressen. Lägg på kompressen på skadan och håll över resterande gel från påsen. Fixera gärna löst med t ex självhäftande gasbinda. Bäst effekt uppnås under de första 3 timmarna.

Varning:

- Att täcka en stor kroppsytta kan orsaka hypotermi.
- För engångsbruk - Återanvändning kan orsaka infektion.
- Använd inte om förpackningen är skadad eller om förbandet verkar uttorkat.

Kemiska brännskador: Vid kemiska brännskador måste såret sköljas noggrant och neutraliseras innan gelen används.



Innehåll	Antal	Art.nr
Brännskadekompress 30x40cm, face mask	1 st	94367
Brännskadekompress 30x30cm	1 st	94379
Brännskadekompress 20x20cm	2 st	94377
Brännskadekompress 10x10cm	4 st	94373
Brännskadegel flaska 118ml	1 st	94390
Brännskadegel 3,5g	5 st	94370
Fixeringsbindor	10 st	78000

TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	FOR BURNS	LÅDOR, SKÅP OCH VÄSKOR	SVERIGE	30065000	93/42/EEC
HÅLLBARHETSTIDSTID				KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT
5 ÅR FRÅN PRODUKTIONSDATUM FÖR ALLA INGÅENDE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER SOM EJ HAR SKADAD FÖRPACKNING.				ISO 13485	ISO 14001
CE				CPV CODES	UNCCS CODES
INGÅENDE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER ÄR CE-MÄRKTA				33141	481930, 481940
ECLASS		UNSPSC			
34210000		42311504			
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1	
KFP	1 st	310x210x120mm	2,843 KG	7311410911460	
KFP / DFP	-	-	-	-	
KFP / TRP	-	-	-	-	
KFP / Pall	-	-	-	-	

