

VR-materialen

Technische handleiding



In de doos

- Pico G3+ headset
- Pico Bewegingscontroller met batterijen
- Pico gebruikershandleiding
- USB-C Voedingsadapter
- Optioneel: Case
- Optioneel: Lensreinigingspray met microvezeldoek

Voorbereiding

Bescherming van de lenzen

Stel de lenzen nooit bloot aan direct zonlicht. Dit kan permanente schade veroorzaken die niet onder de garantie valt.

Pasvorm


Zorg dat de headset goed aansluit: niet te strak en niet te los. Een juiste pasvorm voorkomt drukpunten en verbetert de beeldkwaliteit.

Volume

Controleer vooraf het geluidsniveau om gehoorschade te voorkomen.

Lensafstand (IPD-instelling)

Voelt het beeld onscherp of oncomfortabel? Pas de lensafstand handmatig aan. Er zijn drie standen, aangegeven met witte markeringen boven de lenzen.

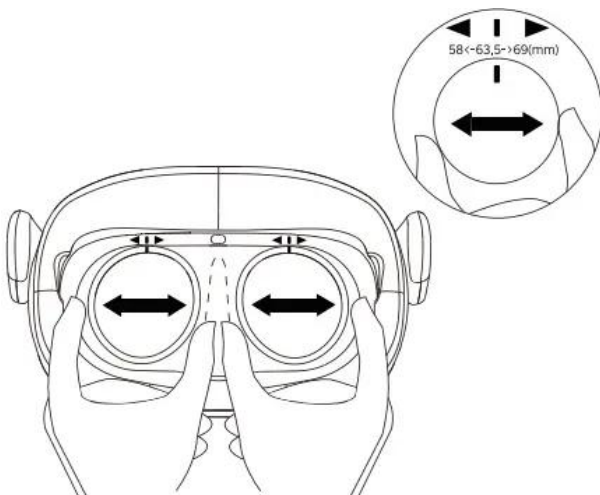

De lensafstand kan handmatig worden aangepast

De Pico G3 inschakelen

- Houd de aan/uit-knop (bovenop, links) ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Zet de headset op en kijk recht vooruit.
- Houd de onderste knop aan de rechterzijde enkele seconden ingedrukt om het beeld te centreren.

Knoppen op de headset

Aan de rechterzijde van de headset bevinden zich drie knoppen. Deze hebben de volgende functies:

- Bovenste knop: Terug
- Middelste knop: Bevestigen/selecteren
- Onderste knop
 - Kort indrukken: hoofdmenu openen
 - Lang indrukken: beeld kalibreren (opnieuw centreren)



3 knoppen op de rechterzijde van de headset

Navigeren zonder de controller (kijken en selecteren)

1. In het menu verschijnt een stip in beeld.
2. Beweeg uw hoofd zodat de stip op de gewenste situatie staat.
3. Kijk ongeveer twee seconden naar de betreffende situatie.
4. Wacht tot de cirkelvormige laadbalk volledig is gevuld. De video start automatisch.

Binnen een situatie:

- Kijk naar de pijlen (links: terug; rechts: vooruit).

- Wacht tot de laadbalk is gevuld om een volgende scène te starten of een zin te herhalen.

Werken met de controller

Het gebruik van de controller is optioneel. In principe navigeert de cliënt zonder controller door middels kijken te selecteren. In sommige situaties kan de controller voor navigatie worden ingezet, bijvoorbeeld als het wenselijk is dat de logopedist navigeert. De knoppen werken als volgt:

Achterzijde

- Trigger (trekker): Bevestigen / selecteren

Zijkant

- Volumeknoppen (+ / -): Geluid aanpassen

Bovenzijde

- Touchpad: Scrollen door te swipen
- Indrukken van het touchpad: Bevestigen

Home-knop

- Kort indrukken: terug naar hoofdmenu
- Lang indrukken (2 seconden): beeld en controller opnieuw centreren



*Boven: touchpad
Midden: terug-knop
Onder: home-knop
Achterzijde: trigger (trekker)
Zijkant: volumeknoppen*

Controller verbinden

1. Open het hoofdmenu (1 keer kort drukken op de onderste knop aan de rechterzijde van de headset).
2. Selecteer aan de linkerkant 'Controller'.
3. Klik op Verbinden.
4. Houd op de controller de Trigger, het Touchpad en de Home-knop 10 seconden ingedrukt.
5. Als 'Verbonden' verschijnt, is de koppeling geslaagd.

Controller loskoppelen

1. Open het hoofdmenu.
2. Selecteer aan de linkerkant 'Controller'.
3. Klik op het i-pictogram rechtsboven.
4. Kies Controller loskoppelen.
5. Bevestig door op Loskoppelen te klikken.

Opladen

Gebruik de meegeleverde USB-C kabel en adapter. Het indicatielampje wordt groen als de headset volledig is opgeladen. Controleer vóór gebruik altijd de accustatus om onderbreking van een sessie te voorkomen.

Reset bij storing

Werkt de headset niet naar behoren? Houd de aan/uit-knop 10–20 seconden ingedrukt om een reset uit te voeren.

Onderhoud en opslag

Lenzen reinigen

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde microvezeldoek.
- Gebruik géén water of schoonmaakmiddelen op de lenzen.

Overige onderdelen reinigen

Reinig het gezichtskussen, de hoofdbanden en de controller volgens het hygiëneprotocol.

Ventilatie

Zorg dat ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd

Controle na gebruik

- Controleer de headset na iedere sessie op zichtbare schade.
- Gebruik de VR-bril niet bij beschadiging van kabel, oplader of headset.

Opslag

Bewaar de headset uitgeschakeld, op kamertemperatuur, in een droge en donkere ruimte.

Hygiëneprotocol

Voor gebruik

1. Desinfecteer uw handen.
2. Reinig het siliconen of kunstlederen gezichtskussen met geschikte desinfectiedoekjes (bijv. Indicin Oxy Wipes of 75% alcohol*).
3. Reinig indien nodig de lenzen met de microvezeldoek.

Na gebruik

1. Reinig gezichtskussen, hoofdbanden, buitenzijde van de headset en controller met desinfectiedoekjes.
 - o Reinig de lenzen uitsluitend met een droge, zachte doek.
2. Berg de headset stofvrij op.
3. Desinfecteer uw handen.

*Let op: langdurig gebruik van alcohol kan kunststof onderdelen aantasten.

Belangrijke aandachtspunten

- Installeer geen apps van derden om de werking van de MAP-applicatie te waarborgen.
- Gebruik de VR-bril bij voorkeur binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen of vocht.

Helpdesk

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

VR Expert Customer Support

 +31 30 711 6183

 support@vr-expert.nl

VR Expert streeft ernaar vragen binnen één werkdag te beantwoorden. Neem gerust contact op voor feedback, tips of andere aandachtspunten.

umcg:
Toegepast Gezondheidsonderzoek

