

SENIOR®



İnekler için ilk ergonomik bolus uygulama aparatı..

Bilimsel olarak
test edilmiştir

SENIOR nedir?

İnekler için ilk ergonomik bolus uygulama aparatıdır. Daha kullanışlı ve daha naziktir..

SENIOR ne için kullanılır?

Süt inekleri içindir.

Ergonomik olan nedir?

SENIOR ağız boşluğundan yemek borusuna uzanan doğal geçiş yoluna uygun şekilde kıvrımlı olarak tasarlanmıştır. Ucu yuvarlatılmıştır.

Neden daha kullanışlıdır?

SENIOR ele daha iyi oturur.

SENIOR hangi malzemelerden üretilmiştir?

Boru kısmı paslanmaz çelikten, itici piston kısmı ise plastikten üretilmiştir..

Nasıl kullanılır?

Bolusu uygulama aparatına yerleştirin. Bir elinizle hayvanın burun sırtı üzerinden uzanarak çenenin dişsiz kenarını kavrayın.

İnek ağızını kendiliğinden açana kadar damağı hafifçe uyarın. Diğer elinizle SENIOR'u ağız boşluğuna dikkatle yerleştirin. Dil kökünün üzerinden dikkatle ilerletin ve kırmızı vida başlığı burun aynası hizasına gelene kadar itin. Bolusu serbest bırakın.

Nasıl temizlenir?

Akan sıcak su altında durulayın.



Damak hafifçe uyarılarak ağızın açılması sağlanır.



Uygulama aparatını dikkatle içeri itin.



SENIOR. Ergonomik.

SENIOR. Bilimsel olarak test edilmiştir.

SENIOR®. Daha kullanışlı ve daha nazik.