


CINTURA CONTENIMENTO **LETTO REGOLABILE**

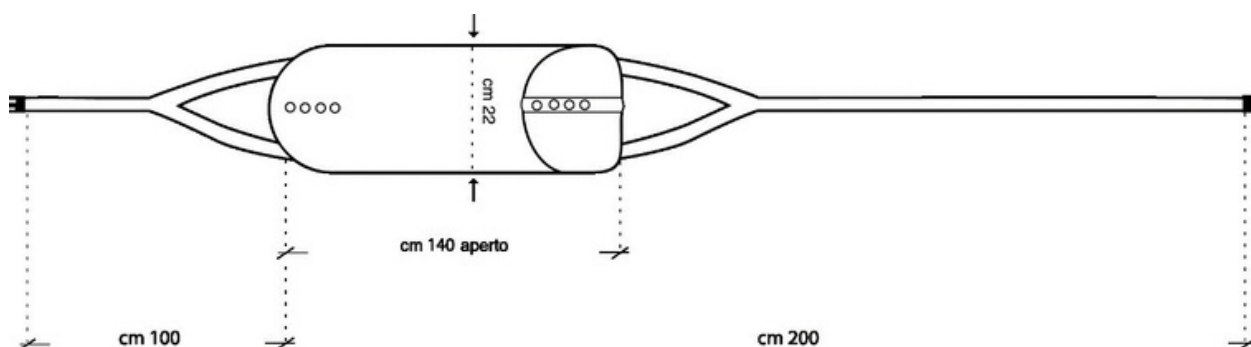

**Via Emilia 39/M;
Lavino di Mezzo
40011 - Anzola
Dell'Emilia (BO)**

Tel. 051-733810
Email info@palmirani.com

La cintura è indicata per pazienti costretti a letto ed incapaci di cooperare. Questa cintura consente di ruotare il paziente su di un lato per necessità.

DIMENSIONI:

Circonferenza regolabile: da 85 a 120 cm

Lunghezza totale: 300 cm

Altezza patta 20-22 cm

Istruzioni per l'Uso

1. Avvolgere il tirante lungo, attorno alla base del letto prima di chiuderlo con la fibbia lateralmente.
2. Chiudere il bustino rigido attorno all'addome del paziente sovrapponendo la patta con i due occhielli all'altra.
3. Bloccare il tutto con l'apposito bottone magnetico di sicurezza.

**Via Emilia 39/M;
Lavino di Mezzo
40011 - Anzola
Dell'Emilia (BO)**

Tel. 051-733810
Email info@palmirani.com